


製品のお手入れ方法につきまして

平素よりご高配を賜り誠にありがとうございます。
当社製品のお手入れ方法につきまして、以下の通りご案内いたします。製品の使用前・使用後の
お手入れの際にご参照ください。

1 通常のお手入れの場合

水で10倍に薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて拭き、次に固く絞った布で水拭きをしてください。その後、乾拭きを十分にしてください。

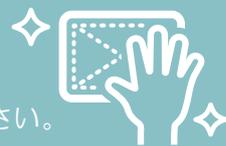

患者さんの皮膚が触れる部分は

エタノールを含ませたやわらかい布で油分を拭き取ってください。次に固く絞った布で水拭きをしてください。その後、乾拭きを十分にしてください。
※患者さんの皮脂やクリームの油分により変色、表面の溶解、ツヤ変化、硬化が生じることがあります。

2 消毒する場合

当社確認済みの消毒液を含ませたやわらかい布で拭いてください。次に固く絞った布で水拭きをしてください。その後、乾拭きを十分にしてください。
※消毒液の使用頻度によっては、硬化や変色などが生じるおそれがあります。



操作部・金属部は

- ・当社確認済みの消毒液を使用した後、固く絞った布で水拭きをしてください。その後、乾拭きを十分にしてください。特に次亜塩素酸ナトリウムを使用した場合は、次亜塩素酸ナトリウムの成分が製品に残らないよう十分に拭き取ってください。サビの原因になります。
- ・湿気や水を嫌うため、水がかかってしまった場合は、すぐに水分を拭き取ってください。サビ、電気部品の故障の原因になります。

当社確認済み 消毒液

- ・エタノール
- ・次亜塩素酸ナトリウム
- ・イソプロパノール
- ・クロルヘキシジングルコン酸塩
- ・ベンザルコニウム塩化物
- ・アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩

- ・下記の物は絶対に使用しないでください。
シンナー、除光液、金属腐食性の強い消毒液（ポビドンヨードなど）、ガソリン、灯油など揮発性薬品、研磨剤入りワックス、研磨剤入りスポンジなど。
- ・お手入れ時、ブラシ、たわしなどを使わないでください。傷がついたり汚れが取れなくなります。
- ・レーザー部は、研磨剤を含有する洗剤、漂白剤などで清掃しないでください。表面が劣化し質感、光沢感が変わるおそれがあります。
- ・当社が認めている部品および付属品以外は、オートクレープやその他の滅菌器で滅菌しないでください。
- ・しばらく使用しなかった製品を再使用するときは、使用前に清掃をしてください。清掃作業をしたあと、製品が正常に作動することを必ず確認してください。

※外装部品は保証の対象外となっておりますが、これらの薬剤の使用によって硬化や変色が生じるおそれがありますので、あらかじめ、ご理解、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。



警告

- ・お手入れの際は電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。感電や発火の原因になります。また、製品が不意に作動するとけがををするおそれがあります。
- ・水をかけて洗わないでください。故障や感電のおそれがあります。
- ・清掃作業を十分にしてください。清掃作業が不十分な場合、菌の発生により人体に影響をおよぼす場合があります。

タカラベルモント株式会社

<大阪本社>

大阪市中央区東心斎橋 2-1-1 TEL : 06-6212-3620

<https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>

