

| 分娩台 |

DG-880



DELIVERY TABLE

**TAKARA
BELMONT**

“美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、リラックスしてほしい、
もちろん健康になってほしい、そしてなによりその尊厳が守られてほしい。
その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、わたしたちタカラベルモント、メディカル事業部の使命です。

出産においても妊産婦、助産師、産婦人科医、みなさんにとってもっと“美しい”姿勢を実現したい。
そんな思いで Women's health care project、始めました。

誰よりも女性、産婦人科医の気持ちや負担を理解している助産師がチームに加わり新しい分娩台を開発。
さらに、出産だけでなく、その前後にある妊婦健診、産前産後ケア、婦人科検診においても
妊産婦の健康で尊厳のある美しさの実現を目指した取り組みをはじめています。



ウィメンズヘルスケア
プロジェクトの詳細はこちらから
<https://whc-takara.jp>



分娩台 | DG-880

緊急時もしっかり対応 充実の機能を備えた 高機能分娩台

不安な陣痛中、緊急対応が求められる分娩中、赤ちゃんとともに安らぐ回復期を様々な機能でサポートします。

通常の分娩はもちろん緊急手術への移行もスムーズ



通常時

分娩第一期～第四期まで
様々な機能でサポート



緊急時

緊急時の対応を考慮した
充実機能を装備

*写真のサイドフェンスと上肢台はオプションです。

分娩体位から手術位へ
スムーズに移行

産婦さんに接近しやすい
テーブルトップ幅60cm。
サイドフェンスから
上肢台へのチェンジも容易に



上肢台を装着し位置を調節





ワンタッチでサイドフェンスを外す




スムーズに手術台へ移行

手術時のテーブルトップ
縦転・横転機構

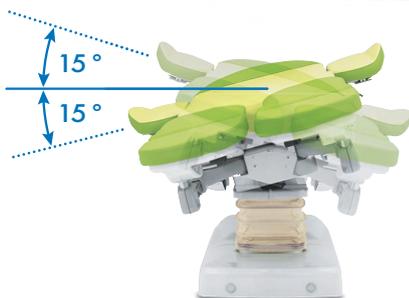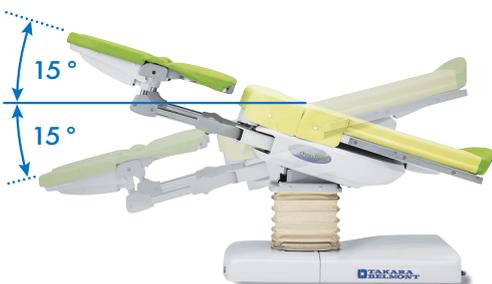

麻酔処置、血圧低下への対応など、
緊急時のポジション確保が可能です。

ストレッチャーの
アプローチ

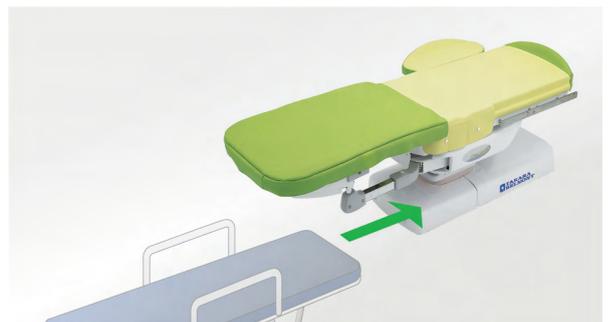

サイドフェンス/サイド上肢台を外すことにより、
ストレッチャーのスムーズな横付けが可能です。

いつものお産に
必要な機能も充実

産婦さんの主体的なお産を
サポートします。



簡単に取り出せて
持ちやすい怒責グリップ

側臥位やマックロパーツ位に



側臥位

側臥位分娩用
支脚器
DG-880-SCG
(オプション)

いきみやすく両脚を
しっかり支える
側臥位分娩用支脚器



マックロパーツ位

補助支脚器
DG-880-CSQ
(オプション)

急速遂娩にも

すっきりとした
脚板形状で
脚元に2人入る
スペースを確保



産婦さんをやさしくサポート

乗り降りしやすい
最低位59cm



無痛分娩時もハンモックのように
足をやさしくホールド



やさしい寝心地の
低反発マット



産婦さん自身で操作
できるハンドスイッチ



*オプションです。

やさしく包みこまれるようなフォルム
&カラーは「赤ちゃんはキャベツ畑で
生まれる」というヨーロッパの言い
伝えにちなみ、「キャベツ」をデザイン
コンセプトに開発しました。

シューフィールド
chou field

分娩位へ簡単セッティング



レバーを引き上げるだけの簡単操作。
ベッド状態から分娩位へ、医療スタッフの人数が
少ない場合もスピーディーにセッティングできます。




フットスイッチ

左右の脚板は、
フットスイッチを
使ったセレクト開脚で
片脚ずつ動かせます。

電動で開脚ができるフットスイッチ
のため手の清潔を保ち、
少ない負担で分娩位へ移行が可能。
産婦さんに合わせた調節もできます。

介助・処置に配慮した新生児受け

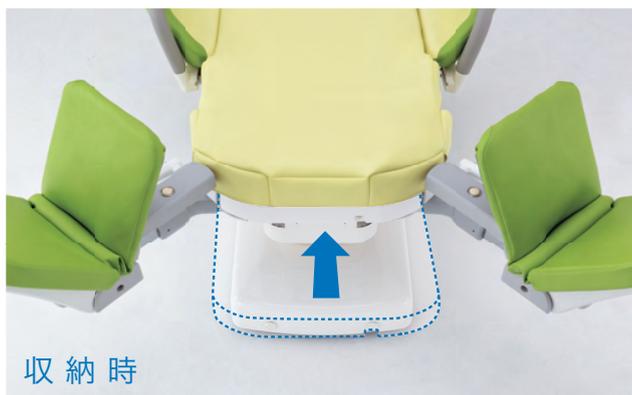

収納時

処置・縫合の際に接近しやすい完全収納式。



スライド時

スライドさせることで側面介助スペースをしっかりと確保。
腰板と新生児受けの位置関係にも配慮しました。

調節可能な腰板単独昇降機構



分娩状況に合わせて調節可能です。

清掃時などの移動を考慮



フリーキャスター+本体ロックで移動・固定が容易に。
分娩前後のセッティング、清掃等の移動がスムーズです。

I OPTIONS



サイドフェンス
DG-880-SF



サイド上肢台
DG-880-SA



支脚器
DG-880-CN



側臥位分娩用支脚器
DG-880-SCG



補助支脚器
DG-880-CSQ



頭上怒責グリップ
DG-880-HG



ハンドスイッチ
DG-880-HSW



サイドレールS
DG-880-SR



汚水トレイ
DG-880-XT

※ロートタイプもご用意しております。
汚水ロートDG-880-XRN



収納カート
DG-880-OPC

サイドフェンス、
サイド上肢台等を収納

I COLOR VARIATION



G1 グリーン(標準色)





P1 ピンク(受注生産)



B1 ブラウン(受注生産)

I SPECIFICATIONS

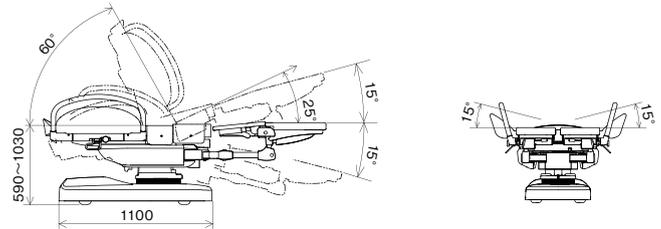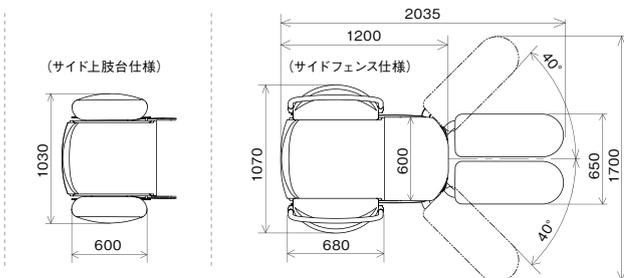

<仕様>

製品コード	DG-880
電気定格	100V 50/60Hz 5A
質量	310kg(本体のみ)
製造販売届出番号	28B1X00012000061
販売名	分娩台 DG-880
標準付属品	シートカバー1枚/枕1個/フットスイッチ1個/電源コード ※怒責グリップは本体に備え付け

思いをかたちに タカラベルモントの医療空間づくり


医院・クリニックの設計・施工、内装デザインについてお気軽にご相談ください。

医院空間の
設計・施工

精度の高い
医院づくり

医療機器の
開発・提供

タカラベルモントはグループの専門ノウハウを活かし、
表現力豊かな手法を駆使しつつ、医院の新装・改装をトータルにお手伝いしています。

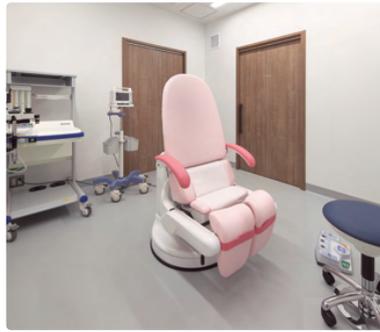

お取引経験者 満足度

※2020年6月時点 社外サーベイ調査結果
(当社調べ、n=42) 当社「空間デザイン・工事」
事業の認知者のうち、お取引経験のある方を
対象とした「空間デザイン」に関する評価。



Instagram

タカラベルモント メディカル事業部公式

施工事例やお役立ち情報を発信中♪
@takara_designworks_medical



タカラベルモント株式会社

●本社
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL. (06) 6212-3620

●メディカル事業部

札幌 (011) 863-2139	新潟 (025) 333-8405
仙台/盛岡 (022) 231-3458	金沢 (076) 221-8412
さいたま (048) 640-5803	大阪 (06) 6211-5947
東京 (03) 3401-9795	岡山 (086) 233-8826
静岡 (054) 237-8822	広島/高松 (082) 277-6700
名古屋 (052) 931-5163	福岡 (092) 474-7306
	鹿児島 (099) 226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19	TEL. (03) 3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL. (06) 6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL. (098) 897-6655

<https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- このカタログは2022年10月現在のものです。

●お問い合わせ



環境に配慮した植物油インキを使用しています