

| 分娩台 |

DG-860



DELIVERY TABLE

**TAKARA
BELMONT**

産婦さん、医療スタッフ、そしてパートナー。
チームで臨むお産を、やさしくサポートする分娩台。

産婦さんへのやさしさや医療スタッフの利便性はもちろん、
パートナーに対する配慮も忘れない——お産に関わるチームの
“距離”を縮めるハートフォルムの分娩台です。



産婦さんに寄り添える「ハート型ポケット」

■ 当社分娩台史上最も低い「初高 485mm」



485mm

膝ほどの高さで
乗り降りの負担を
さらに軽減

脚板先端の
耐荷重
135kgを実現

これまで最も低かった※
「分娩台DG-820YJ」から
マイナス65mm更新

※参考：モデル身長162cm

※当社分娩台比

■ ぴったり横付けできて移載しやすい「隙間レス設計」



サイドフェンス、
怒責グリップは
クッション下に完全収納

ストレッチャーを
ぴったりと
横付け可能

緊急時も
スムーズな
移載が可能

乗り降りの負担を軽減する低初高

当社分娩台史上最も低い、初高485mmを実現。小柄な方でも踏み台なしでの乗り降りが可能です。また、初回歩行時には前方から降りることができ、ふらつきに配慮しました。



産婦さんと医療スタッフを共に支える、ハートフォルムの分娩台

産婦さんに寄り添えるハート型ポケット

パートナーや医療スタッフが寄り添いやすい、ハート型の形状を採用しました。

LDRにも対応した幅広シート

陣痛期も広々と過ごせる幅広シートで、産婦さんがゆったり過ごせるスペースを確保しました。



やさしい寝心地の
ジェルマット



脚板は介助を邪魔しない スマート設計

ドクターと助産師の2人が入れるスペースを確保することで、急速遂娩時にもしっかり対応。外側からの診療や介助時などにも邪魔になりません。

すっきりとした
脚板形状で
脚元に2人入れる
スペースを確保



お産の“姿勢”を追求したサポート機能



産婦さん自身でも
操作できる
ハンドスイッチ



ハンドスイッチやナースコール、
ペットボトル等の整理に便利な
多目的ホルダー付き

※カラビナ、ペットボトルホルダーは
付属品ではありません。

フリースタイル分娩にも対応

■ 座位



■ マックロパーツ位



体位に合わせて
しっかり蹴れる
クッション搭載

■ 四つん這い



■ 側臥位



脚板の耐荷重は135kg
分娩介助の際に、腰かけることができます

医療スタッフの負担を軽減する、効率のいい仕様を実現

分娩位へ簡単セッティング



レバーを引き上げるだけの簡単操作。ベッド状態から分娩位へ、医療スタッフの人数が少ない場合もスピーディーにセッティングできます。



電動で開脚ができるフットスイッチのため手の清潔を保ち、少ない負担で分娩位へ移行が可能。産婦さんに合わせた調節もできます。

よく使う姿勢にオート動作で移行可能なプリセット機能を搭載

ワンタッチで移行でき、フットスイッチを押し続ける必要がありません。

※本体高さ・背もたれ角度



ワイヤレスフットスイッチで足もとスッキリ

赤外線が360°送信され、操作時の配置や向きへの自由度がアップ。



本体での操作も可能なサブスイッチ



脚への負担を軽減する下腿サポート



取り外して交換可能な保持ベルト

無痛分娩時にも脚をしっかりサポートします。

介助・処置に配慮した新生児受け



新生児受けは、処置・縫合の際に接近しやすい完全収納式。

骨盤誘導線を調整できる腰板単独昇降



フットスイッチ操作にて腰板のみを上下昇降させることができ、分娩状況に合わせた腰板の調整が可能です。

緊急時にも対応可能な機能を搭載

移載のしやすさにこだわった隙間レス設計



怒責グリップとサイドフェンスはクッション下に収納できるため、側面が完全なフラット形状に。緊急時にストレッチャーをぴったりと横付けでき、移載がよりスムーズに行えます。




レバーを引いて倒すだけでクッション下に収納可能な怒責グリップ



引いて回すだけの感覚的な操作が可能な回転収納式サイドフェンス

ヘッドダウンの姿勢に対応した背もたれリクライニング機能

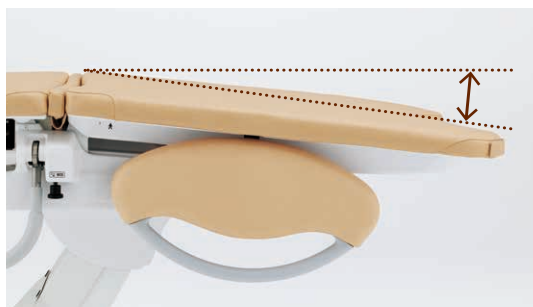

水平よりも低い位置まで頭を下げられる、背もたれリクライニング機能を搭載しました。

緊急処置を考慮した設計



心臓マッサージなど、荷重のかかる処置時にも配慮した強度を確保。また、ハート型ポケットにより、頭側からの介助のしやすさも叶えました。

医療スタッフをサポートする便利機能



足元を照らせるフロアライト



清掃時などに便利なフリーキャスター



すっきりまとめられるコードベルト

OPTIONS



サポートグリップ
DG-860-SG



DG-860用防水カバー
DG-OPT-860B

脚袋 一箱 (20足)
DG-810-KB

COLOR VARIATION



ES21 ベージュ(標準色)





ES19 ベビーピンク



ES35 レモネード

SPECIFICATIONS

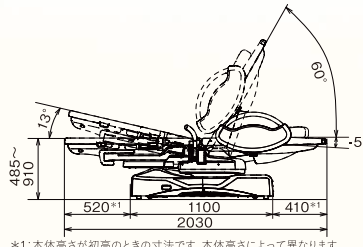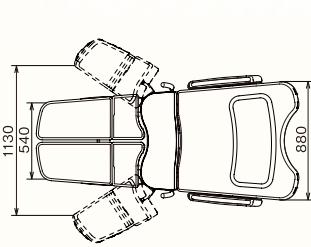

*1: 本体高さが初高のときの寸法です。本体高さによって異なります。

仕様

製品コード	DG-860
電気定格	AC100V 480/510VA 50/60Hz
質量	製品本体:300kg、ジェルマット:5kg
製造販売届出番号	27B1X00042000090
販売名	分娩台 DG-860
標準付属品	シートカバー1枚/枕1個/フットスイッチ1個/ジェルマット上下1組/ 多目的ホルダー1本/脚保持ベルト8本/コードベルト2本/電源コード ※ハンドスイッチ、怒責グリップは本体に備え付け



“美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、リラックスしてほしい、
もちろん健康になってほしい、そしてなによりその尊厳が守られてほしい。
その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、
わたしたちタカラベルmont、メディカル事業部の使命です。



ウィメンズヘルスケア
プロジェクトの詳細はこちら
<https://whc-takara.jp>

タカラベルmont株式会社

- 本社
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620
- メディカル事業部
- 札幌 (011)863-2139 金沢 (076)221-8412
- 仙台/盛岡 (022)231-3458 大阪 (06)6211-5947
- さいたま (048)640-5803 岡山 (086)233-8826
- 東京 (03)3401-9795 広島/高松 (082)277-6700
- 名古屋 (052)931-5163 福岡 (092)474-7306
- 新潟 (025)333-8405 鹿児島 (099)226-9481

- ショールーム
 - 東京 東京都港区赤坂7-1-19 TEL.(03)3401-9795
 - 大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6211-5947
 - 沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 TEL.(098)897-6655
- <https://www.takarabelmont.co.jp/medical/>



Instagram
タカラベルmont
メディカル事業部公式
施工事例やお役立ち情報を発信中♪
@takara_designworks_medical



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- このカタログは2024年4月現在のものです。

●お問い合わせ



環境に配慮した植物性インキを使用しています