

Flalith Series

産婦人科検診台 フラリス / フラリスK



シンプルな動線と 洗練された空間で 患者さんに寄り添った 個室診療を

産科・婦人科診療において行われる
診察室での診察・経腹超音波検査や、
内診室で行われる内診・経膈超音波検査。
各診察室間の移動や診察台・内診台への乗降りには
身体的負担と共に移動や更衣の時間がかかります。

診察室と内診室での診療が
一つの空間で可能になれば……。
さらに、一つの検診台で可能になれば……。
患者さんやドクター・スタッフに優しい動線と
より効率的な診療形態を
実現できるのではないのでしょうか。

診察と内診の両方を可能にした
検診台フラリスで、患者さんに寄り添った
個室診療をご提案します。



Flalith

Flalith【フラリス】とは
Flat position と Lithotomy position を
組み合わせた造語。
2つのポジションにおける
使い易さを追求しました。





導入レイアウト(参考)

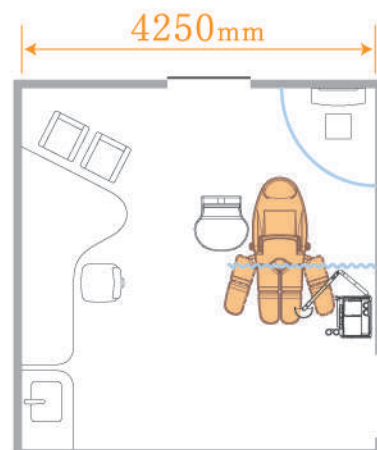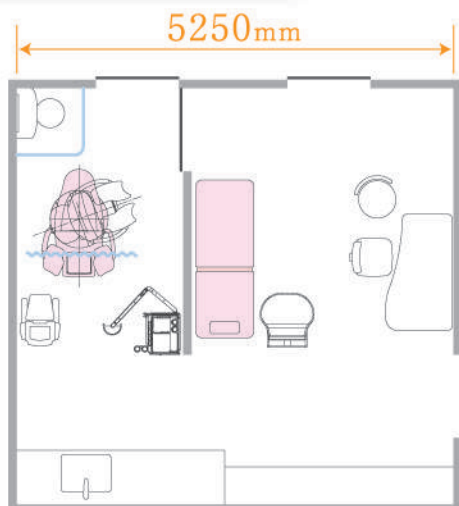

Flalith 検診台 フラリス DG-FL750N1

診察・内診の両方を やさしくサポートする検診台。

診察室と内診室との移動を無くすことにより
診療における動線がシンプルになり、
スペースと時間を有効に
お使いいただけます。

乗降りしやすい背起き
ベッドポジションから
ワンタッチでそれぞ
れの診察に適したポジ
ションへ移行します。

診察・ 経腹エコー

ワンタッチで診察・経腹エコーポジ
ションへ移行。検診台側面はスッ
キリしたデザインで、患者さんに接近
しやすく診察が容易に行えます。





内診・ 経膈エコー

ワンタッチで内診ポジションへスムーズに移行。開脚の際、支脚部先端が屈曲し踵受けとなるので、膝が立てやすく自然な動きの開脚が可能です。

診療域

経膈プローブ操作が容易に行えるよう診療スペースは広く確保。



セレクト開脚

股関節に疾患のある方には閉脚状態から左右片方ずつ徐々に開脚することが可能です。



骨盤高位ポジション

シート部は単独でチルトが可能。診察時の視野確保に役立ちます。



撮影協力: GEヘルスケア・ジャパン株式会社

Function

WIRELESS

ワイヤレスフットスイッチ

赤外線を使用したワイヤレスフットスイッチを採用。検診台のベース周りがスッキリします。



本体補助スイッチ

経膈エコーポジション、内診ポジション、乗降位置への移行操作が補助的に行えます。



本体側面にあります。

樹脂製汚水トレイ

腐食に強く、撥水加工された樹脂製汚水トレイを採用。着脱が可能で、お手入れが容易に行えます。

Flalith K

検診台 フラリスK DG-FL750K1

産科・婦人科における
さまざまな診察や処置を
サポートできる機能がこの一台に。

安定感のある昇降式支脚部で
開脚時の患者さんの脚を
やさしくサポート。



レバー操作により容易に患者さんの
脚を支脚部にセッティング可能です。



内診・ 経膈エコー

脚を広範囲で支えるため開脚
時の安定感がアップ。経膈
プローブ操作が容易に行える
よう診療スペースは広く確保。

乗り降りしやすい
背起きベッドポジションから、
各診察ポジションに
スムーズに対応します。



診察・ 経腹エコー

低初高でのフラットポジション
を実現。患者さんに接近しや
すく診察が容易に行えます。



セレクト開脚機能

フットスイッチ操作にて左右片方ずつ徐々に開脚
できるので、患者さんに応じた対応が可能です。

骨盤高位ポジション

シート部は単独でチルト可能。
診察時の視野確保に役立ちます。

ワイヤレスフットスイッチ

赤外線を使用したフットスイッチ
の採用により診察室がスッキリ
します。



本体補助スイッチ

操作が補助的に行えるよう、
本体側面に設けています。



Option

上肢台



DG-FL750-A

※上肢台とサイドフェンスの取付には取付金具 (DG-FL750-TK) が別途必要です。

サイドフェンス



DG-FL750-SF

ロールシート(12本入り)



汚水タンク



小型(容量5ℓ)/大型(容量10ℓ)

シートヒーター

DG-FL750-E

布状ヒーターの採用で、やわらかいクッション性を保ったままシートを保温できます。

クスコ掛け

排水トラップ

Color Variation



ES9
アイボリー



ES23 (受注生産)
アルモンドブルー



ES20 (受注生産)
コーラルピンク

※写真はDG-FL750N1です。

レザーにもこだわっています!

抗菌・耐アルコールレザー採用



抗菌性

JIS Z 2801:2010「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。






耐アルコール性




アルコールによる耐性試験を実施。
※当社基準に基づく

Dimensions

— フラリス — DG-FL750N1

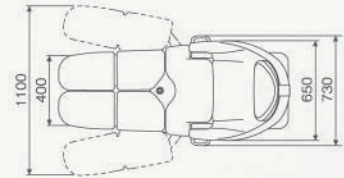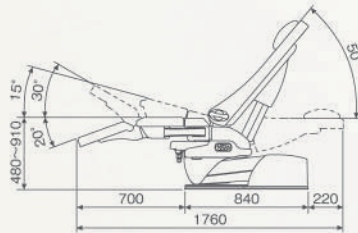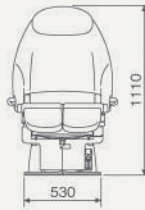

— フラリSK — DG-FL750K1

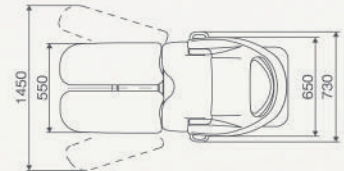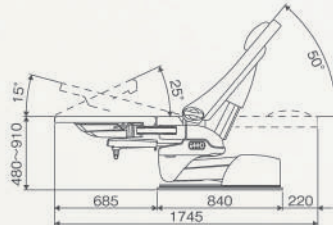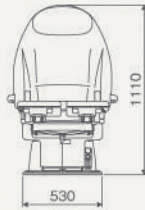

(単位: mm)

Specifications

製品コード	DG-FL750N1、DG-FL750K1
本体昇降範囲	480mm~910mm
背モタレ寝起範囲	0°~50°
シートチルト範囲	0°~15°
プリセット/オートリターン動作	○
電気定格	AC100V 50/60Hz 5A
フットスイッチ電源	DC6V(単三乾電池4本)
質量	DG-FL750N1:205kg/DG-FL750K1:208kg

製造販売届出番号	28B1X00012000069
販売名	検診台 DG-FL750

動作(運転)モード・・・非連続動作 最大3分、デューティーサイクル 1:20

※ デューティーサイクル/油圧モータの連続動作時間に対する休止時間の比率 (ただし、環境温度により異なります。)

標準付属品 ・枕1個 ・汚水トレイ(金網付)1式 ・排水ホース(バンド付)1式
・フットスイッチ1個 ・ビニールシートカバー1枚

検診スカート

ディスプレイザブルで清潔、恥ずかしさもやわらぐ!

検診スカートの着用により、検診時の衣服の上げ下げの負担を軽減。

診察・超音波検査・内診がそのままスムーズに行えます。

巻スカートタイプのため妊婦さんにも容易に着用いただけます。

丈 : 65cm
サイズ : フリー(腹囲~120cm)
素材 : ポリプロピレン100%
製品コード : DG-OPT-S2-10



DG-WS Series

診察室の雰囲気を引き立てる
デザインと収納力で
診療をサポートします。



※写真はDG-WS110N(湿式タイプ)、
オプションカラー(ウッド調)です。

● クスコウォーマー

クスコを適度に保温し、挿入時の不快感をやわらげます。



湿式タイプ



乾式タイプ

● 洗浄ユニット

洗浄液を保温し、適度な水量で吐出します。



Option

壁面収納



DG-WS-A
鉗子立2個、トレー1個付

サイドテーブル



診療用ライト

太陽光に近い色温度で見やすさを追求したLEDライト。

DG-301S



製品コード: DG-301S
製造販売届出番号:
27B1X00042002047
販売名:
診療用ライト DG-301S

- 適正な色再現性
- 低消費電力
- タッチレススイッチ
- 強制点灯モード

Color Variation

ベーシックカラー



オプションカラー
(費用別途 / 他バリエーションあり)



Specifications

製品コード	DG-WS210	DG-WS210D	DG-WS110N	DG-WS110DN	DG-WS100N
クスコウォーマー	湿式	乾式	湿式	乾式	—
洗浄ユニット	○	○	—	—	—
電気定格	AC100V 450VA(50/60Hz)	AC100V 280VA(50/60Hz)	AC100V 230VA(50/60Hz)	AC100V 40VA(50/60Hz)	AC100V
質量	66kg	65kg	63kg	62kg	60kg
寸法(W×D×H)	510×400×950mm	510×400×960mm	510×400×950mm	510×400×960mm	510×400×950mm
製造販売届出番号	27B1X00042000061				
販売名	診療ユニット 産婦人科ワークステーション				

※掲載写真のクスコ、小物類は付属品ではありません。



“美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、
リラックスしてほしい、もちろん健康になってほしい、
そしてなによりその尊厳が守られてほしい。
その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、
わたしたちタカラベルmont、メディカル事業部の使命です。



ウィメンズヘルスケア
プロジェクトの
詳細はこちらから



<https://whc-takara.jp/>

