



内視鏡検査・処置対応

診察台

EX - ESD

 **TAKARA
BELMONT**

術野の確保、患者さんの体位保持に配慮しま

FEATURE

■ 縦転・横転機能搭載

処置部位により、内視鏡操作だけでは術野の確保が困難な場合に、最大12°の縦転・横転操作で病変部にかかる重力方向の調整や病変部を覆った水を動かし、視野を確保します。また、体位変換の補助に用いる事でドクター、患者さん双方の負担を軽減します。

※縦転・横転作動:本体高さ690mm~920mm時に作動可能




縦転位



横転位

■ 体圧分散マット

長時間の処置にも対応できるよう、体圧分散を考えたプロファイル加工のマットを採用。居住性の向上に加え、クッション形状の工夫により縦横転時の体位保持にも有用です。

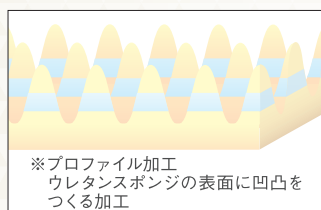

■ 収納式サイドフェンス（非導電性素材）

ドクター側のサイドフェンスは収納式となっており、テーブル側面に出っ張りがないので施術の妨げになりません。また、サイドフェンスは非導電性素材を使用し、高周波電流分流に配慮しました。




収納時



引出し時

■ 足元スペースの確保

ベース形状の工夫により、処置時に使用するフットスイッチ類の配置が容易になりました。

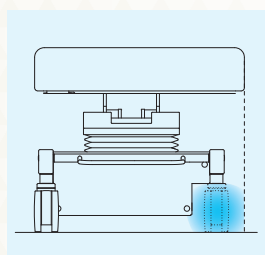

側面図


■ 移動性の向上

大型の4輪キャスターの採用により、処置前後の運搬がスムーズに。キャスターロックペダルの操作で4輪ロック、4輪フリー、直進ロックの3段階に切替可能です。



■ ロールシートホルダー

検査・処置時に使用するロールシートが本体に収納できます。

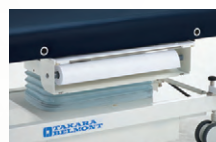

■ ハンドスイッチ


誤操作を防ぐ“E”スイッチを装備。水平復帰スイッチ、縦横転作動域表示ランプを装備。



OPTION





体位保持クッション（側臥位用×1、補助用×3）
EX-ESD-P

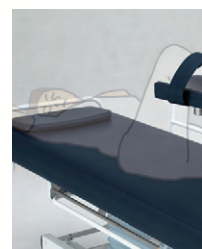

下部処置用下腿受
EX-ESD-H

した。

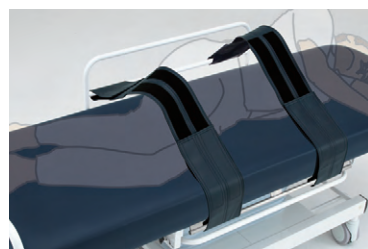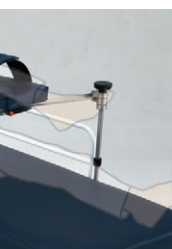

体位保持ベルト
EX-ESD-B

・患者さんの姿勢確保・転落防止に有用です。



イルリガートル架
EX-ESD-D



サブフットスイッチ
EX-ESD-FS

【本体昇降・2メモリー機能】
・一般検査に便利です。



検査台ロールシート
EB-OPT-R2

【幅600mm、1本当たり50シート
(750mmごとにミシン目あり)
2本入り】


SPECIFICATIONS

EX-ESD 仕様一覧

製品コード	EX-ESD
本体寸法	W650×L1900mm
本体昇降範囲(電動油圧式)	575～920mm
本体縦転角度(電動油圧式)	－12°～12° 本体昇降高さ690mm未満では縦転動作は行いません。
本体横転角度(電動油圧式)	－12°～12° 本体昇降高さ690mm未満では横転動作は行いません。
水平停止機構	縦転・横転動作時
サイドフェンス	片側収納式、片側差込式
キャスター	4輪直進、4輪ロック、4輪フリー切替え式
電気定格	AC100V 420/470VA 50/60Hz
質量	185kg(付属品込み) 付属品1.5kg
標準付属品	ハンドスイッチ、枕、ロールシートホルダー
製造販売届出番号	27B1X00042000059
販売名	診察台 EX-ESD

DIMENSIONS

EX-ESD 寸法図 [単位: mm]

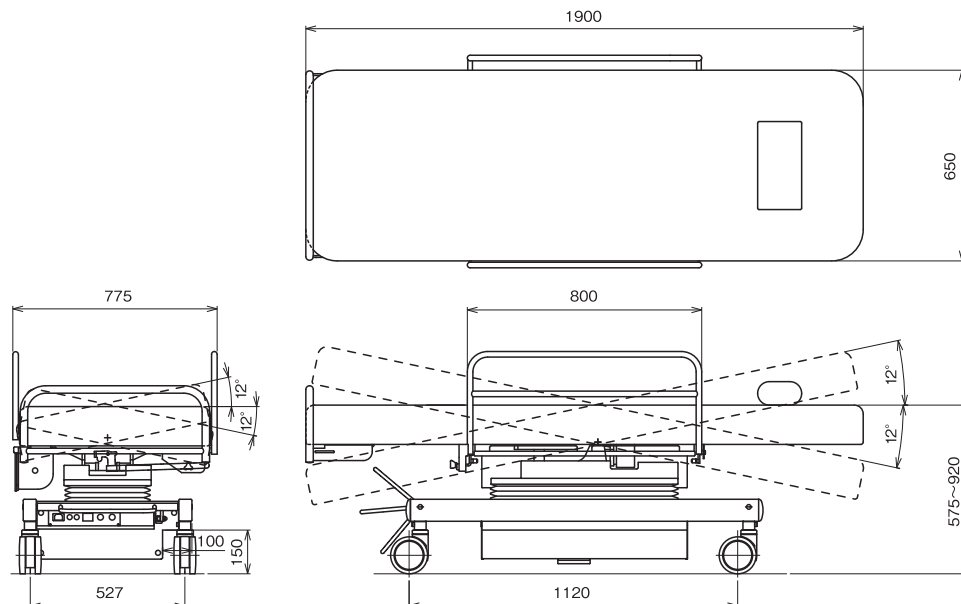

移動型内視鏡検査・処置対応 ベルフリット

製品コード: EB-BFTN
販売名: ベルフリット
製造販売届出番号: 27B1X00042000067



内視鏡検査・処置対応 EX-CS8

製品コード: EX-CS8
販売名: 診察台 EX-CS8
製造販売届出番号: 27B1X00042000076



タカラベルモント株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル

札幌 (011)863-2139	金沢 (076)221-8412
仙台/盛岡 (022)231-3458	大阪 (06)6211-5947
さいたま (048)640-5803	岡山 (086)233-8826
東京 (03)3401-9795	広島/高松 (082)277-6700
新潟 (025)333-8405	福岡 (092)474-7306
名古屋 (052)931-5163	鹿児島 (099)226-9481

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19	(03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1	(06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	(098)897-6655

<https://me.takarabelmont.co.jp>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年4月現在のものです。

●お問い合わせ

