


DG-385

緊急分娩、緊急処置への対応を
可能にした機能型分娩台。

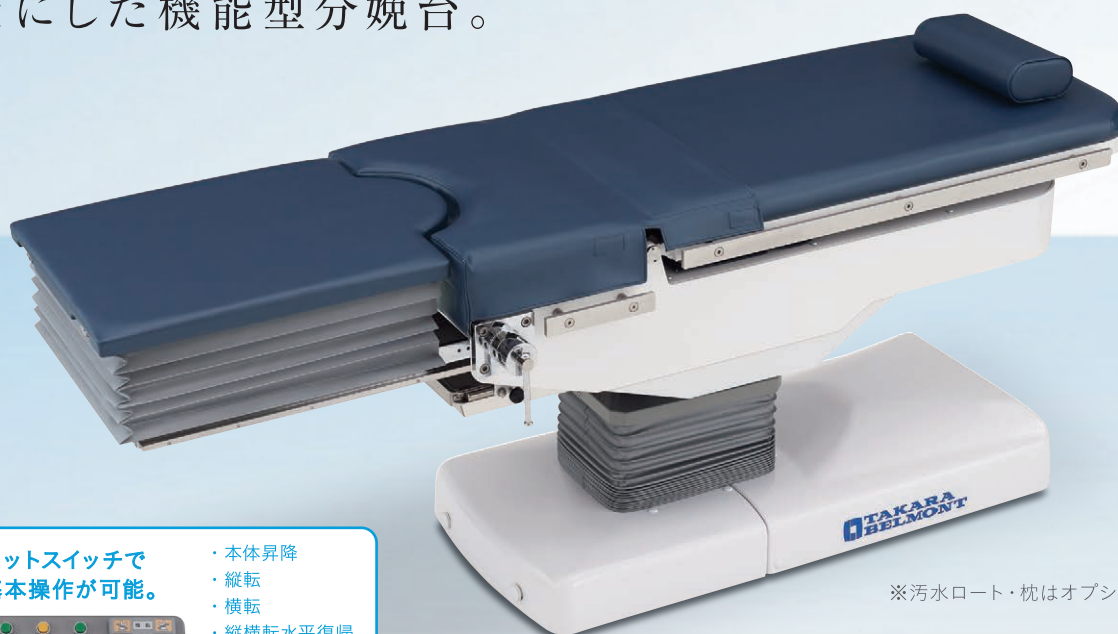

フットスイッチで
基本操作が可能。



- ・本体昇降
- ・縦転
- ・横転
- ・縦横転水平復帰
- ・背モタレ昇降
- ・補助台スライド
- ・シート部(腰板)単独昇降


※汚水ロート・枕はオプションです。

FEATURE


縦横転機構・電動スライド式補助台が、緊急時の対応をきめ細かくサポートします。

■ 縦横転機構

麻酔処置、血圧低下への対応など、
緊急時のポジション確保が可能。
縦横転の水平復帰はオート操作で
行えます。

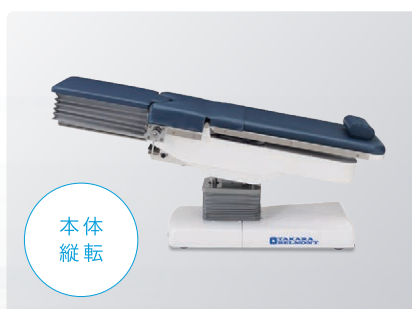


本体
縦転

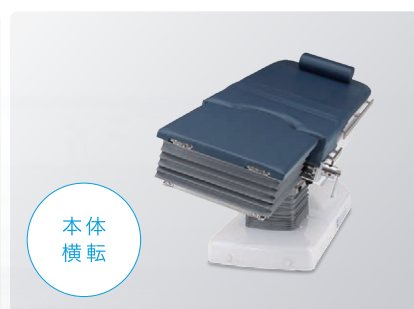

本体
横転

■ 電動スライド式補助台

補助台のスライドは電動で調節が
可能。分娩の進行状況や処置に合わ
せた対応ができます。

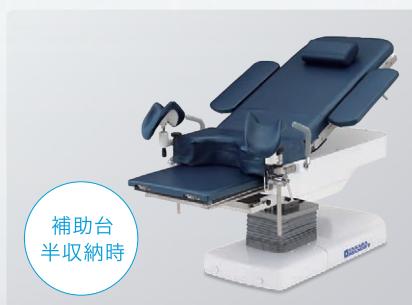

補助台
半収納時



補助台
収納時

■ 着脱式クッション

補助台・シート部のクッションが取り外せるので、清掃が容易に行なえます。


取り外し後▷



取り外し前▷

■ キャスター+本体ロック

キャスター+本体ロックで移動・固定が容易に。分娩前後のセッティング、清掃時などの移動がスムーズです。

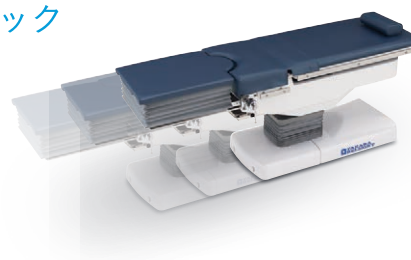

■ 抗菌・耐アルコール

菌の増殖を抑制し、アルコールの耐性を持つ合成皮革の採用でお手入れがしやすくなります。



抗菌性

JIS Z 2801:2012「抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。



耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。
※当社基準に基づく

OPTIONS



股受け(左右1組)
DG-396N-C




踵受け(左右1組)
DG-396-BN



上肢台
DG-385-AN






汚水ロート
DG-385-XR

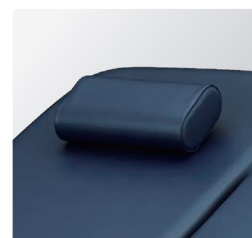

枕
EX-CS-MS ES23

SPECIFICATIONS

寸法図 [単位:mm]

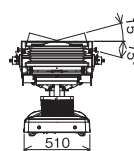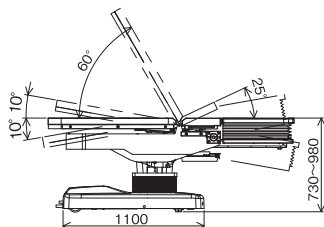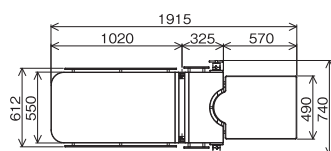

仕様

製品コード	DG-385V
電気定格	100V 50/60Hz 5A
質量	290kg
主な構成	フットスイッチ1個、電源コード1本、シートカバー1枚、怒責棒1組
製造販売届出番号	28BIX00012000072
販売名	分娩台 DG-385

“美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、
リラックスしてほしい、もちろん健康になってほしい、
そしてなによりその尊厳が守られてほしい。
その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、
わたしたちタカラベルmont、メディカル事業部の使命です。



ウィメンズヘルスケア
プロジェクトの
詳細はこちらから



<https://whc-takara.jp/>

