



———— リカバリー用ビューアーソフトウェア ————

見えない気づきを、かたちに。

Point

- 動きと変化を見える化
- スタッフの見守り業務サポート
- スケジュール管理

センシング画面

センシング画面では各ベッドIDの状態を一覧できます。患者さんを検出した状態であれば患者情報（人物アイコン／名称／年齢）の入力が可能です。




※PC画面例 ※本製品は医療機器ではありません。診断・治療を目的としたものではありません。

直感的に設定できる シンプルな操作感を追求

「空室」のリカバリールームにベッドIDを割り当てることで、あらかじめ入力したベッドIDに対応する患者さんのセンサー情報を表示させることができます。リカバリーを開始するときは「開始」のボタンを押すことで、タイマーがスタートしリカバリーを開始します。

1. ベッドIDをリカバリールームに割り当てる。

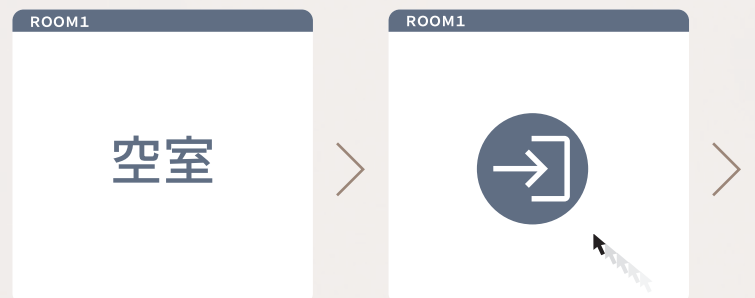


「空室」のリカバリールームの中から割り当てたいリカバリールームを選択する。

スマートに導入でき、すぐにフル活用

M-tied専用ローカルエリアネットワークを構築し、センサーと専用ルーター、専用PCをローカルエリアネットワークで接続するだけで使用可能。センサーは検査ベッドに組み込まれ、パルスオキシメーターもBluetooth接続できるため、コードレス運用が可能です。

※M-tiedの接続には当社製の移動型内視鏡検査・処置用テーブル「ベルフリット」が必要です。

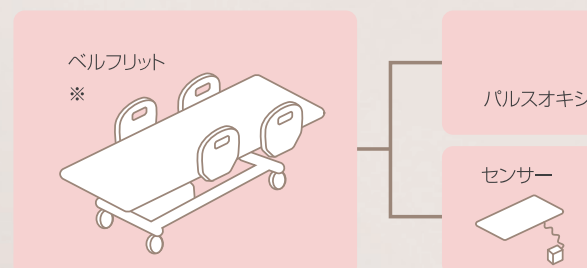

※ 示したものは医療機器です。本製品（ビューアソフトウェア）

モニター上に一括表示



体動チェック

患者さんの体動をアイコン表示や波形、数値で確認。



動き出しを波形とカラーバーで視覚的に表示。

患者ステータス

体動のグラフ



ステータスバー



患者情報表示

患者情報 (心拍数・呼吸数) と血中酸素飽和度*を色別された数値表示で確認。

パルスオキシメーター未接続時▶

SpO2 (%)

HR (bpm) 50 RR (rpm) 17 SpO2 (%) 97

※

※本製品に表示される心拍数・呼吸数・血中酸素飽和度を診断に使用することはできません。

※心拍数・呼吸数はセンサーマット(医療機器)、血中酸素飽和度はオプションのパルスオキシメーター(医療機器)にて測定した数値です。

医師の判断により、上下限値を定め、設定値を超えると知らせる設定が可能です。画面表示の色を反転する設定も可能です。

HR (bpm) 95 RR (rpm) 15 SpO2 (%) 88

※



時間表示

リカバリー時間の管理は3タイプから選択可能。

●タイマー方式

110:43

開始

●ストップウォッチ方式

0:32'18"

開始

●リカバリー開始時間表示

13:05

開始

2. リカバリーを開始する




表示を行うベッドIDを選択し「OK」をクリックする。



リカバリータイムの「開始」をクリックする。

[センサー組み込み位置イメージ]

下图の破線部分にセンサーを組み込んでいます。

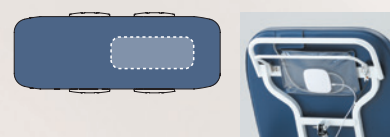

コアユニット部分

パルスオキシメーター[オプション]

専用PC

専用ルーター

ア)は医療機器ではありません。

リカバリー用ビューアソフトウェア M-tied 【製品コード:TD-MTV】

【仕様】

動作環境	OS	Windows11Pro(日本語)
	プロセッサ	インテルCorei3-1215Uプロセッサ (6コア、10MBキャッシュ、最大4.4GHz)以上
	メモリ	8Gbytes以上
	ストレージ	256GBytes(SSD)以上
	無線LAN(2.4GHz)	認証WPA、WPA2、802.1X 暗号化 64Bit及び128Bit(a/b/gモード)
供給形態	USBメモリ	

本製品は医療機器ではありません。

※以下の構成品・オプションは医療機器です。

- センサー内蔵移動型内視鏡テーブル [ベルフリット、センサーマット]
- パルスオキシメーター (オプション)

【M-tied運用に必要なセット】

■ センサー内蔵移動型内視鏡テーブル

・ベルフリット【製品コード：EB-BFTNT/BFTFT/BFTCT】

製造販売届出番号：27B1X00042000067

販売名：ベルフリット

製造販売元：タカラベルモント株式会社

・センサーマット【製品コード：TD-MTS】

製造販売届出番号：23B2X10051000003

販売名：TS-2100センサ

製造販売元：テクノホライゾン株式会社

● 専用ルーター【製品コード:TD-MTR】※

● 専用PC 【製品コード:TD-MTP】※

※専用ルーターと専用PCの必要台数は施設により異なります。

【オプション】

■ パルスオキシメーター(※当社指定機種)【製品コード：TD-MTB】

医療機器認証番号：227AGBZX00046000

販売名：パルスフィット B0-750

製造販売元：日本精密測器株式会社

※Bluetooth機能搭載タイプ(B0-750BT)

移動型内視鏡検査・処置用テーブル

Belflit
ベルフリット

前処置～内視鏡検査・処置～移送～
リカバリーを追求したセデーション下
内視鏡対応モデル。

EB-BFTN
(スタンダードタイプ)



EB-BFTC
(コンパクトタイプ)



EB-BFTF
(フラットタイプ)



製造販売届出番号:27B1X00042000067 販売名:ベルフリット

TAKARA BELMONT DESIGN WORKS

タカラベルモントの医院空間づくり

設計・施工、内装デザインについて
お気軽にご相談ください。

大型モニター設置などM-tied導入と併せて、
空間づくりのご相談も承っています



タカラベルモント株式会社

【大阪本社】 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

● メディカル営業部

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま(048)640-5803 東京 (03)3401-9795
横浜/静岡 (045)523-7010 新潟 (025)333-8405 名古屋(052)931-5163 金沢 (076)221-8412
大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306
鹿児島 (099)226-9481

● ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 (03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 (06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 (098)897-6655



<https://me.takarabelmont.co.jp>

- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2025年11月現在のものです。

お問合せは