


マンモグラフィ撮影用チェア

座位でもスムーズにポジショニング&撮影。
座ることで少しでもリラックスして
マンモグラフィ検査を。

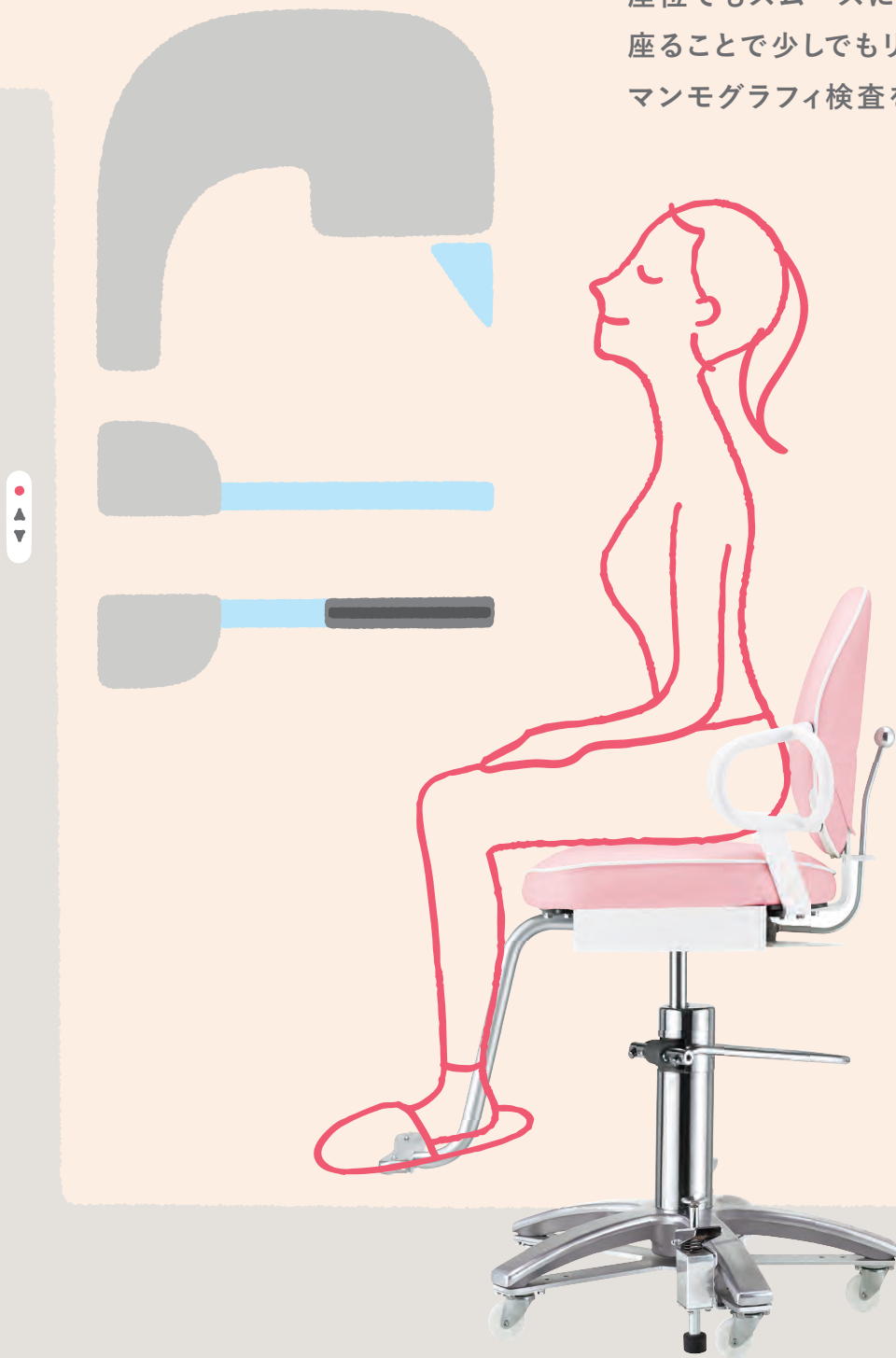

診療椅子 マンモキュート

m a m m o c u t o



**TAKARA
BELMONT**


座面の横スライドで乳房の位置調整をサポート。

座面を左右にスライドさせることで、
左右乳房のポジショニング切り替えがスムーズに行えます。

Right-and-left slide

左右スライド

座面が左右にスライドすることで、
椅子本体を動かさずに左右の乳房を
撮影台の中心に持ってくることで
できます。左右各4段階
(2,4,6,8cm)にスラ
イド可能なため、細か
な間隔で位置調整
いただけます。

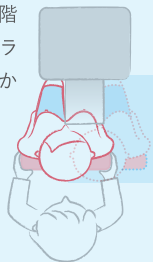

背もたれ後方の
レバーを軽く押す
ことで、左右それ
ぞれの位置に座面を
スライドできます。

Seat lifting and lowering

本体昇降

本体後方のペダルを軽くポンピング
することで本体の高さ調節ができます。

座面が左右に4段階スライド

8 6 4 2 0 2 4 6 8 (cm)



Chair top rotatable

座面回転

椅子への導入がスムーズに行え、
MLO撮影時には、座面の回転を
利用して、受診者の身体の角度を
微調節できます。
回転は本体後方の
ペダルで止める
ことも可能です。



Body positioning belt

体位保持ベルト

背もたれ横のグリップ
に通して使用する
ことで、受診者の
姿勢確保に有用
です。



● Color Selection



ES19(標準色)
(ベビーピンク)



ES17
(フロスグリーン)



ES23
(アルドブルー)

● 仕様

製品コード: MM-CUTO N
本体外形寸法: W590mm×D715mm×H1090mm(Hは最大高さ)
シート昇降範囲: 497mm~700mm
シートスライド固定位置: センター、左右各20mm、40mm、60mm、80mm
製品質量: 28kg
主な構成部品: 体位保持ベルト(1個)
一般的名称: 診療・処置用椅子
特定保守: 非該当
製造販売届出番号: 27B1X00042000062
販売名: 診療椅子マンモキュート

吸引式乳房組織生検対応

診察台 EX-MGT



一般的名称: 汎用診断・処置用テーブル
特定保守: 非該当
製造販売届出番号: 27B1X00042000053
販売名: 診察台 EX-MGT

診療椅子 マンモビュー



一般的名称: 診療・処置用椅子
特定保守: 非該当
製造販売届出番号: 27B1X00042000058
販売名: 診療椅子 MM-PEW

