

泌尿器科機器 検診台 総合カタログ

Urological Equipment

人と医療の未来を美しく

安心してお使いいただける製品と、心地よい医療空間を。
わたしたちはプロフェッショナルの想いをカタチにします。

タカラベルモント メディカル 営業部は
「美しい人生を、かなえよう。」という全社パーパスのもと、
「人と医療の未来を美しく」を事業目的とし、
ビジョンに「姿勢をつくる」を掲げています。

人生に寄り添う医療現場のお仕事に、私たちも寄り添っていきたい。

医療機器の提供から、空間提案、開業支援、メンテナンス、
安心して快適に医療を受けることのできる環境づくりまで
タカラベルモントらしい新たな製品・サービスを提供し続けるために。

わたしたちは常にチャレンジし続けます。

いついかなる時でもひとりひとりが 美しく生きる喜びを感じられるように。
社会が 美しく生きる幸せでみたまされるように。

泌尿器科検診台ラインアップ



UR-7300 P2-4



Flalith K P5-6
フラリス K



UR-325 裏表紙

抗菌・耐アルコールの
合成皮革を採用



抗菌性

JIS Z 2801:2012「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。



耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。
※当社基準に基づく

UR-7300

フラット機能搭載 & コンパクトな
椅子型検診台で、
よりスムーズな診療を。

WIRELESS

■ ワイヤレスフットスイッチ

赤外線を使用したワイヤレスフットスイッチを採用。コードが無いので診察室がスッキリします。



フラットポジション

閉脚したままワンタッチで容易にフラットポジションへ移行でき、ストレッチャー移載時や処置後の安静時、仙骨麻酔時などの体位変換にもスムーズに対応できます。

■ 閉脚した状態でフラットポジションへ移行



■ 側臥位イメージ



手すりを
跳ね上げることで、
ストレッチャー移載が
スムーズに。



患者さんに合わせて、診療域をより広く

フットスイッチによる左右開脚のセレクトと開脚調節が可能で、診療内容や患者さんに応じたポジショニングを実現します。



通常開脚



閉脚検診位



セレクト開脚

患者さんへの思いやりをカタチに

■ 座 面

椅子のように座面を備え、安定した座位姿勢を提供。当社従来品より座面の奥行を短くし、腰掛けやすくなりました。



■ レッグサポート機構

膝受けは下腿から支える形状を採用。脚を広範囲で支えるため開脚時の安定感がアップ。



コンパクトな設置スペースを実現

回転は、ベース円周に沿って本体上部が移動する独自の回転機構「オフセットラウンド機構」を採用。回転半径の縮小※により設置スペースがコンパクトに。(回転タイプのみ)

※当社従来製品比。



検診位までスピーディに移行

乗降位置から検診位への移行時間を最大約40%短縮※。診療時間を有効に活用できます。

※当社従来製品比。

ワイドにフォローする汚水トレイ

ワイドな汚水トレイが水の飛散をフォロー。2ポジションの電動昇降式のため、下降させることで患者さんへの接近も容易に。また腐食に強い樹脂製汚水トレイは着脱が可能で、お手入れが容易に行えます。



■スプラッシュガード(オプション)

前方への水跳ねを軽減するオプションをご用意しました。



診察をサポートする便利機能


- 本体補助スイッチ搭載
- ショックレス回転
- プリセット2メモリー搭載
- 音声ガイド機能

Options

- 上肢台
DG-7300-A



- シートヒーター
DG-7300-E

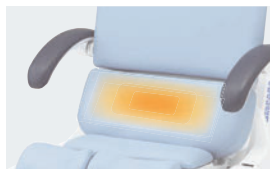

※ヒーター部はイメージです。

- ロールシート
(12本入り)



- スプラッシュガード
- 股受けカバー DG-OPT-KB2
- 汚水タンク
小型(容量5ℓ) 大型(容量10ℓ)
- 排水トラップ

Color Selection



ES16(標準色)
パープルブルー



ES19
ベビーピンク



ES17
フロストグリーン




ES9
アイボリー



ES2
イエロー



Dimensions

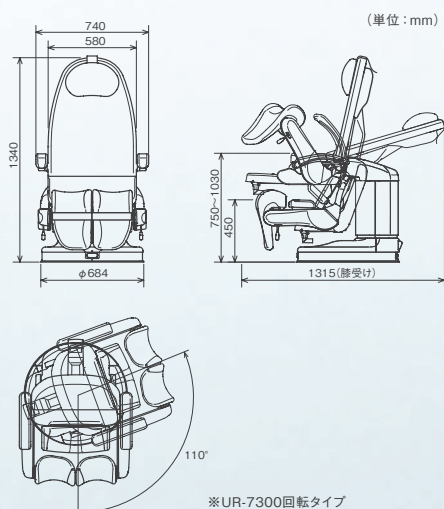

※UR-7300回転タイプ

Specifications

製品コード	UR-7300 (回転タイプ)	UR-7300-F (固定タイプ)
本体昇降／本体チルト	電動油圧式、フットスイッチ操作	
本体回転	電動油圧式、110°左右切替方式	—
プリセット／オートリターン動作	○	
電気定格	AC100V 50/60Hz 900/1000VA	
操作	フットスイッチ (赤外線通信)	
フットスイッチ電源	DC6V (乾電池)	
質量	230kg	210kg
一般の名称	泌尿器科用診察台	
特定保守	非該当	
製造販売届出番号	27B1X00042000068	
販売名	泌尿器科検診台 UR-7300	

作動(運転)モード

非連続作動、最大3分、デューティーサイクル 1:5

※デューティーサイクル: 油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率 (ただし、環境温度により異なります。)

主な構成

- フットスイッチ 1個
- 電源コード 1本
- 枕 1個
- 樹脂製汚水トレイ(金網付) 1式
- 排水ホース(バンド付) 1式

フラットポジションや
碎石位にも対応し、
さまざまな診察を
サポート。



フラットポジション



スムーズな移行が実現できる

2ポジションの
プリセット機能を搭載

碎石位



レバー操作により
スムーズな碎石位への
移行をサポート

フラットポジションが容易にとれ、多様なシーンに対応

膀胱鏡検査や硬膜外麻酔など、さまざまな診察に対応可能なフラットポジションへ容易に移行でき、スムーズな処置が行えます。


■ 仰臥位



■ 開脚位




■ 側臥位

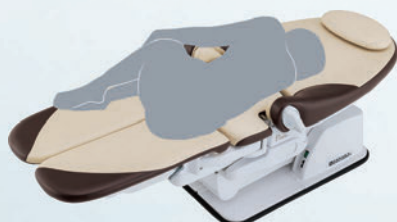

■ 腹臥位



診療時の操作性に配慮し、スムーズな診療をサポート

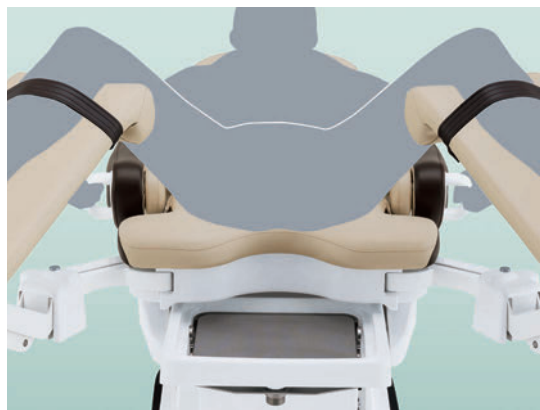

■ 碎石位へスムーズに移行でき、十分な診療域を確保

碎石位における診療域を広く確保し、各種処置がスムーズに行えます。
また脚を広範囲で支えるため、開脚時の安定感が向上します。

■ セレクト開脚機能

フットスイッチ操作にて左右片方ずつ徐々に開脚できるので、患者さんに応じた対応が可能です。

■ ワイヤレスフットスイッチ

赤外線を使用したフットスイッチの採用により診察室がスッキリします。



■ 骨盤高位ポジション

腰部は単独でチルト可能。診察時の視野確保に役立ちます。

■ 本体補助スイッチ

操作が補助的に行えるよう、本体側面に設けています。



Options

● 上肢台 DG-FL750-A



● サイドフェンス DG-FL750-SF



● シートヒーター DG-FL750-E



● ロールシート (12本入り)



● 汚水タンク 小型(容量5ℓ) 大型(容量10ℓ)

● 排水トラップ

※上肢台とサイドフェンスの取付には取付金具(DG-FL750-TK)が別途必要です。

※ヒーター部はイメージです。

Color Selection



ES9(標準色)
アイボリー




ES23
アルドブルー



ES20
ピンク



Dimensions

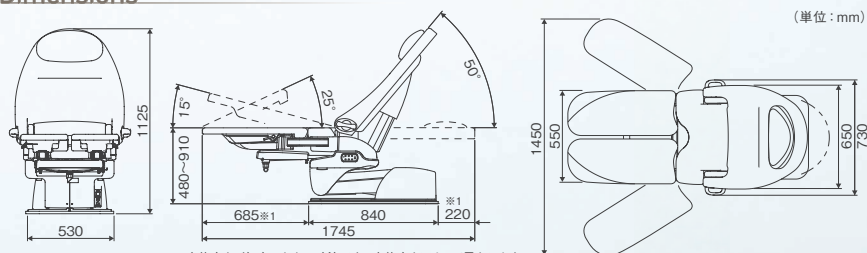

※1 本体高さが初高のときの寸法です。本体高さによって異なります。

Specifications

製品コード	DG-FL750K1
本体昇降範囲	480mm～910mm
バックレスト昇降角度	0°～50°
腰部昇降角度	0°～15°
プリセット／オートリターン動作	○
電気定格	AC100V 50/60Hz 5A
フットスイッチ電源	DC6V(単三乾電池4本)
質量	208kg
一般の名称	汎用診断・処置用テーブル
特定保守	非該当
製造販売届出番号	28B1X00012000069
販売名	検診台 DG-FL750

製造販売業者：タカメディカル株式会社 兵庫県尼崎市額田町5-15

作動(運転)モード・・・非連続作動、最大3分、
デューティサイクル 1:20

※デューティサイクル：油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率(ただし、環境温度により異なります。)

主な構成品

●フットスイッチ 1個 ●電源コード 1本 ●枕 1個
●樹脂製汚水トレイ(金網付) 1式 ●排水ホース(バンド付) 1式

UR-325

患者さんにやさしい乗り降りと、
スムーズな昇降で
効率的な診療を。

■ ワイヤレスフットスイッチで 足元スッキリ



■ 本体補助スイッチを装備



Options

● 上肢台 DG-325-A



● サイドフェンス DG-325-SFS



● 医師用肘置き UR-325-I




● 足板 DG-325-H



● カーテン架 UR-325-CBK



● シートヒーター DG-325-E

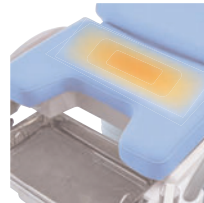


※上肢台、サイドフェンスの取付には、サイドレール(DG-325-A-SR、2本1組)が別途必要です。

※ヒーター部はイメージです。

● ロールシート (12本入り) ● 汚水タンク 小型(容量5ℓ) 大型(容量10ℓ) ● 排水トラップ ● ビニールシートカバー

Dimensions

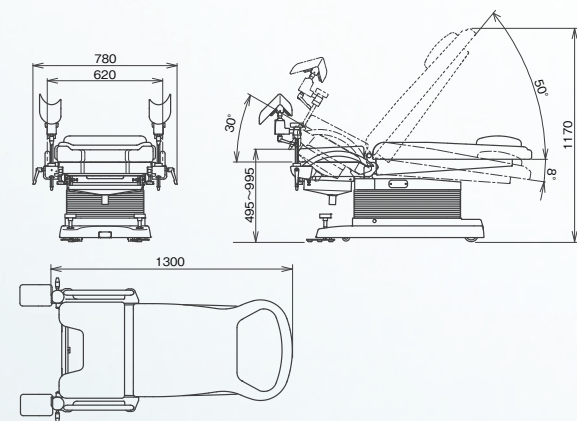

Specifications

製品コード	UR-325	作動(運転)モード
本体昇降範囲	495mm~995mm	非連続作動、最大3分、 デューティーサイクル1:5
バックレスト昇降角度	-8°~50°	※デューティーサイクル: 油圧モータの連続作動時間に対する休止時間の比率 (ただし、環境温度により異なります。)
腰部昇降角度	0°~30°	
プリセット/オートリターン動作	○	
電気定格	AC100V 470/540VA 50/60Hz	主な構成品
質量	137kg	● フットスイッチ 1個 ● 電源コード 1本 ● 枕 1個
一般的名称	泌尿器科用診察台	● 膝受け 1組 ● 汚水トレイ(金網付) 1式
特定保守	非該当	● 排水ホース(バンド付) 1式
製造販売届出番号	27B1X00042000087	
販売名	泌尿器科検診台 UR-325	

タカラベルmont株式会社

● 本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL. (06) 6212-3620

● メディカル営業部

札幌 (011) 863-2139 横浜/静岡 (045) 523-7010 大阪 (06) 6211-5947
仙台/盛岡 (022) 231-3458 新潟 (025) 333-8405 岡山 (086) 233-8826
さいたま (048) 640-5803 名古屋 (052) 931-5163 広島/高松 (082) 277-6700
東京 (03) 3401-9795 金沢 (076) 221-8412 福岡 (092) 474-7306
鹿児島 (099) 226-9481

● ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 TEL. (03) 3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL. (06) 6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 TEL. (098) 897-6655

<https://me.takabelmont.co.jp>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2026年7月現在のものです。

● お問い合わせ