

外科用手術台

DR-2600 SERIES

外科用手術台

DR-2600 SERIES




必要とされる機能を厳選し、シンプルを追い求め生まれた手術台のスタンダードモデル。

現場の声を活かし、選び抜かれた機能で、各科の手術に対応します。

— クオリティーもプライスも大切にしたい —

そんな思いから誕生したのがDR-2600シリーズです。

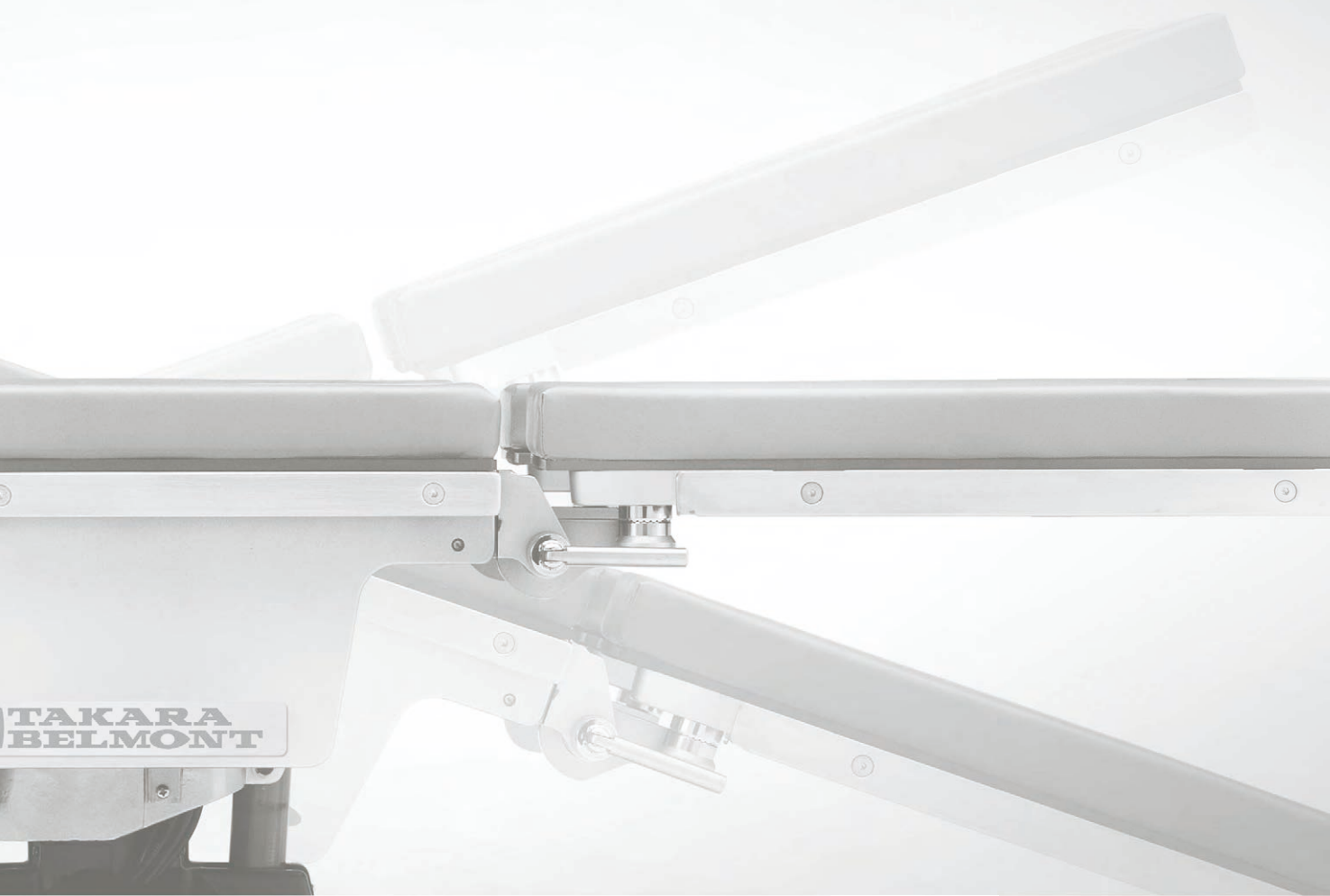

POSITIONS & OPERATIONS

☐ 碎石位 (支脚器別売)




☐ ジャックナイフポジション



☐ 脚板屈折・開脚




☐ 縦転位

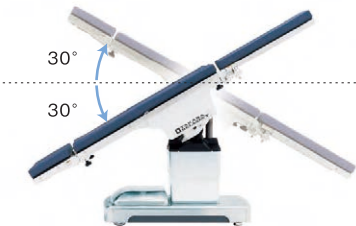

☐ 横転位



☐ 背板屈折

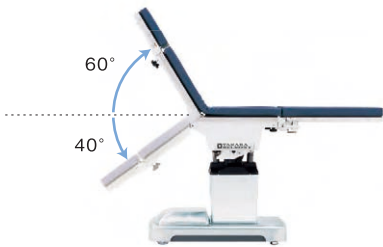

※ テーブルトップスライドタイプは
上方65°、下方30°

FEATURES



枕板・脚板の差し替えが可能

各科手術に柔軟に対応

枕板と脚板を差し替える事で、外科手術対応においてより広い足元スペースと透視領域を確保できます。

背板屈折仕様

一般外科・耳鼻科・眼科・皮膚科・美容形成外科など



腰板屈折仕様

一般外科・産婦人科・泌尿器科など

腰板から脚板下部に広いクリアランスを確保し、C-アームによるイメージング、碎石位のポジショニングが容易に行えます。



テーブルスライド

Select DR-2600V-S・DR-2600V-SY

より広い透視領域を確保


背板屈折仕様

テーブルトップが頭方向に20cm、脚方向に10cmスライドします。



腰板屈折仕様

テーブルトップが頭方向に10cm、脚方向に20cmスライドします。

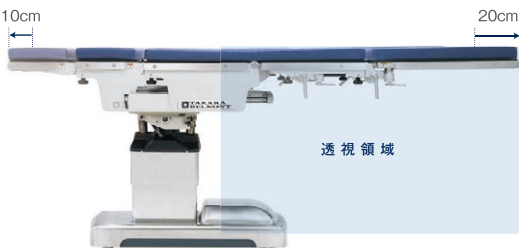

※背板屈折仕様、腰板屈折仕様共に、テーブルトップスライド時本体中央で一時停止します。



バッテリー搭載

Select DR-2600V-Y・DR-2600V-SY

繰り返し充電に強く、長時間使用が可能※リチウムイオンバッテリーを採用。本体ベース部にバッテリー残量が目でわかるパネル表示を設けています。
※鉛蓄電池比(当社従来製品)



水平復帰・水平一時停止


テーブルトップのワンボタンによる水平復帰機能を装備し、術後の水平への移行がスムーズに行えます。縦転・横転・背板(腰板)の作動においては、水平一時停止機能を装備し、ポジション変換、水平確認が容易に行えます。



FUNCTIONS

□カセットレール内蔵

半切まで使用でき、術中撮影が効率よく行えます。

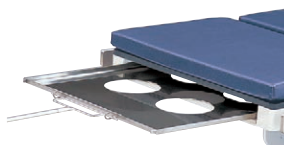

□緊急停止スイッチ

緊急時に作動を停止させます。



□低電圧リモートコントロールスイッチ

安全性を考慮したDC5Vのメンブレン仕様低電圧リモートコントロールスイッチを採用し、誤操作防止の"E"スイッチも装備。



□本体固定

電動油圧式アジャスターロック機構を採用し、操作性を向上させました。

VARIATIONS

プラグイン

ベーシック

□ DR-2600シリーズのベーシックモデル

DR-2600ZV



※DR-2600ZV-F (脚板一枚仕様)

スライド

□ テーブルトップスライドモデル

DR-2600V-S



※DR-2600V-SF (脚板一枚仕様)

□ バッテリー搭載ベーシックモデル

DR-2600V-Y



※DR-2600V-YF (脚板一枚仕様)

□ バッテリー搭載テーブルトップスライドモデル

DR-2600V-SY



※DR-2600V-SYF (脚板一枚仕様)

バッテリー搭載型

※脚板一枚仕様もバリエーションとして設定しています。

SPECIFICATIONS

DR-2600 Series 仕様一覧
一般の名称:汎用電動式手術台
特定保守:該当
製造販売届出番号:28B1X00012000003
販売名:外科用手術台DR-2600

	DR-2600ZV ベーシック	DR-2600V-Y バッテリー	DR-2600V-S スライド	DR-2600V-SY スライドバッテリー		
テーブルトップ寸法	W500×L2,063mm					
ベース寸法	W495×L935mm					
質量	220kg	240kg	250kg	270kg		
電気定格	100V 50/60Hz 5.0A	100V 50/60Hz 6.0A	100V 50/60Hz 5.0A	100V 50/60Hz 6.0A		
バッテリー電圧	—	DC25.2V	—	DC25.2V		
本体移動／固定	電動油圧式アジャスターロック機構					
本体昇降範囲(電動油圧式)	700～1,000mm(クッションは除く)		730～1,030mm(クッションは除く)			
本体縦転角度(電動油圧式)	頭上方30°、頭下方30°					
本体横転角度(電動油圧式)	右上方20°、左上方20°					
背板屈折角度(電動油圧式)	上方60°、下方40°		上方65°、下方30°			
スライド(電動油圧式)	—		枕側200mm、脚側100mm(背板屈折仕様時)			
水平一時停止機構(電動油圧式)	縦転、横転、背板昇降動作					
水平復帰機構(電動油圧式)	縦転、横転、背板昇降動作					
枕板屈折角度(手動)	上方30°、下方90°					
脚板屈折角度(手動)	上方0°、下方90°					
脚板開脚角度(手動)	右方90°、左方90°					
主な構成品	ハンドスイッチ1個、電源コード1本					

[製造販売業者]タカラメディカル株式会社
 兵庫県尼崎市額田町5-15

DIMENSIONS

DR-2600ZV (ベーシック)
 DR-2600V-Y (バッテリー)

Technical drawing of the DR-2600ZV (Basic) and DR-2600V-Y (Battery) tables. The drawing shows the table from the side and front views. The side view shows a total width of 2063mm, with segments of 311mm, 500mm, 500mm, and 752mm. The height is 500mm. The front view shows a base width of 935mm and a height of 700-1000mm. The side view also shows a height of 562mm. The front view shows a base width of 495mm.

DR-2600V-S (スライド)
 DR-2600V-SY (スライドバッテリー)

Technical drawing of the DR-2600V-S (Slide) and DR-2600V-SY (Slide Battery) tables. The drawing shows the table from the side and front views. The side view shows a total width of 2063mm, with segments of 311mm, 500mm, 500mm, and 752mm. The height is 500mm. The front view shows a base width of 935mm and a height of 730-1030mm. The side view also shows a height of 562mm. The front view shows a base width of 495mm. The side view shows a height of 100mm.

ACCESSORIES

□ 上肢台



製品コード: DR-OPTM-AT
一般の名称: 手術台アクセサリ
特定保守: 非該当
製造販売届出番号:
28B1X00012000019
販売名: 上肢台M

□ ボールジョイント上肢台



製品コード: DR-OP-ATBF
一般の名称: 手術台アクセサリ
特定保守: 非該当
製造販売届出番号:
28B1X00012000080
販売名: BJ上肢台
※クッションは別売です。

□ 側臥位用上肢台



製品コード: DR-OPTM-G05
一般の名称: 手術台アクセサリ
特定保守: 非該当
製造販売届出番号:
28B1X00012000032
販売名: 側臥位用上肢台M

□ 自在胴受け




製品コード: DR-OPTM-EN05
一般の名称: 手術台アクセサリ
特定保守: 非該当
製造販売届出番号:
28B1X00012000029
販売名: 自在胴受けM

□ 支脚器



製品コード: DR-OPTM-CN05
一般の名称: 手術台アクセサリ
特定保守: 非該当
製造販売届出番号:
28B1X00012000026
販売名: 支脚器M

□ 透視用上肢台小型

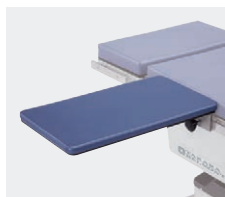


製品コード: DR-OPTM-SIAK/SIBK
一般の名称: 手術台アクセサリ
特定保守: 非該当
製造販売届出番号:
28B1X00012000047
販売名: 透視用上肢台小型M

□ アームシールド




製品コード: DR-OPTM-AS2

□ カセットトレイ

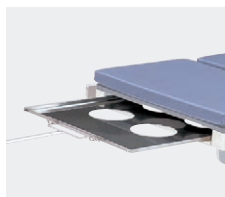

製品コード: DR-OPTM-J

□ 枠付汚水ロート

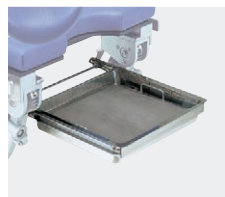

製品コード: DR-OPTM-X20/X78/X26S

※手術台機種によりコードが異なります。
詳細は弊社営業担当へお問い合わせ
ください。

□ KTEK3100スターラップ※1



製品コード: DR-OPTM-KTEK
一般の名称: 手術台アクセサリ
特定保守: 非該当
製造販売届出番号:
14B1X00004000131
販売名: KTEKスターラップ
※クランプ、カートは別売です。

[製造販売業者] タカラメディカル株式会社 兵庫県尼崎市額田町5-15 ※1 ガデリウス・メディカル株式会社 神奈川県相模原市中央区富士見2-7-1

タカラベルモント株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル

札幌	(011)863-2139	金沢	(076)221-8412
仙台/盛岡	(022)231-3458	大阪	(06)6211-5947
さいたま	(048)640-5803	岡山	(086)233-8826
東京	(03)3401-9795	広島/高松	(082)277-6700
横浜/静岡	(045)523-7010	福岡	(092)474-7306
新潟	(025)333-8405	鹿児島	(099)226-9481
名古屋	(052)931-5163		

●ショールーム

東京	東京都港区赤坂7-1-19	TEL.(03)3401-9795
大阪	大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL.(06)6211-5947
沖縄	沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL.(098)897-6655

<https://me.takarabelmont.co.jp>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2026年7月現在のものです。

●お問い合わせ



環境に配慮した植物油インキを使用しています