

移動型内視鏡検査・処置用テーブル

Belflit
ベルフリット



**TAKARA
BELMONT**

Concept

内視鏡検査・処置をこの一台で。

前処置～内視鏡検査・処置～移送～リカバリーを追求したセデーション下内視鏡対応モデル。

検査・処置及び移送のしやすさはもちろん、
患者さんにとっても負担の少ない検査姿勢を追求したベルフリット。

内視鏡室とリカバリー室、それぞれの部屋へ移送する際の
移動性の高さを目指し、“flit(= 軽快に動く)”な環境を提供します。

Line-up [standard / compact / flat]


STANDARD type

スタンダードタイプ [EB-BFTN]

手動でバックレストの寝起きが可能なスタンダードタイプ。バランスのとれたベース設計で、より安定感のある運用が可能です。

スムーズなリクライニング操作

ガスシリンダーで操作をアシストします。
バックレストを起こすと腰部が沈み、患者さんの背ずれを
抑える、スリップレス機構を採用しました。

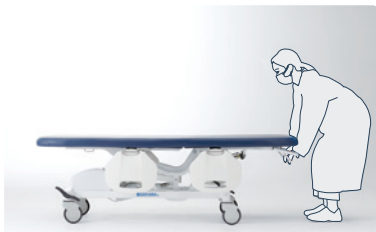

ビーチチェア ポジションがとれる

バックレスト角度は無段階で
調節いただけます。バックレ
ストを上げた状態で脚を伸
ばした体勢を取ることが可能
です。




一体型クッション天板で 清掃しやすい

バックレストからレッグレストまで
一体型のクッション天板により、
すき間が少なく清掃しやすい構造
です。



導入レイアウト図(参考)

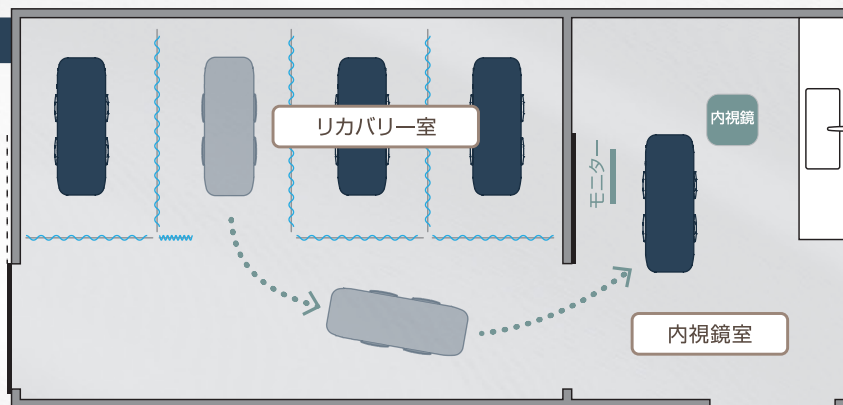

COMPACT type

コンパクトタイプ [EB-BFTC]

レッグレスト部分が折れ曲がるコンパクトタイプ。



小回りが利きやすい 省スペース設計

チェア形状になることで、より小回りが利きやすくなり、省スペース運用をかなえます。



乗り降りしやすい チェア形状

レッグレスト部分が折れ曲がるため、側面からの乗り降りがよりスムーズに行え、車いすからの移載等にも対応しやすくなります。



スムーズなリクライニング操作

レッグレストはバックレストと連動して動作し、ガスシリンダーで操作をアシストします。バックレストを起こすと腰部が沈み、患者さんの背ずれを抑える、スリプレス機構を採用しました。



FLAT type

フラットタイプ [EB-BFTF]

リクライニング機能をなくしたエコノミー仕様。



移送用のハンドル付

頭側にあるハンドルで移送のしやすさに配慮しました。



Features

スタンダードタイプ

コンパクトタイプ

フラットタイプ

大型4輪キャスター採用で 移送がスムーズ

トータルロック付キャスター

1度のペダル操作で4輪フリー、直進ロック、4輪ロックに切替可能です。ロック時には回転と旋回の双方が固定され、安定感のある検査をサポートします。



足元広々なオフセットデザイン

ベース部オフセットデザインで足元を広く確保。電気メスなどの機器のフットスイッチが配置しやすくなりました。



乗り降り&施術しやすい昇降機能

本体昇降スイッチに加えて2メモリーのプリセットスイッチを採用。高さ調整をアシストします。



プリセット(2ポジション)付き ハンドスイッチ

本体昇降スイッチに加え、2メモリーのプリセットスイッチを採用。バッテリー残量が低下すると、ハンドスイッチの操作時にランプ表示とブザー音でお知らせします。また、シート横にハンドスイッチホルダーも用意し、収納場所にも配慮しました。



OPTION


プリセット(2ポジション)付き サブフットスイッチ

オプションのサブフットスイッチでも本体の昇降操作が可能です。



スペースを取らない 回転式サイドフェンス(非導電性素材採用)

回転式のため、スペースを取らずにフェンス操作することが可能です。また、収納状態ではフェンスが天板内に収まり、検査時やベッド等への移載の際により近づくことが可能です。

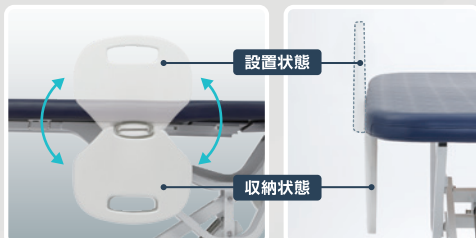

片手で操作できる ワンハンドルロック 機構搭載

フェンスは片手で操作可能です。「設置状態」と「収納状態」位置で手を離すとロックが掛かります(内側から押してもロック解除されません)。

サイドフェンスを掴んでの移送が可能




やさしい寝心地のクッション天板

ソフトでやさしい寝心地のクッション天板を採用。



OPTION

体圧分散マット

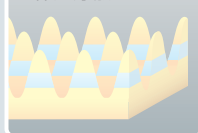

ウレタンスポンジの表面に凹凸をつくるプロファイル加工も選択可能です。(受注生産)

カセット式リチウムイオンバッテリー

繰り返し充電に強く、長時間使用が可能*な小型リチウムイオンバッテリーを採用。1回の充電で約100回の本体昇降が可能です(新品時)。バッテリー減少時にはLEDランプと警告音の両方でお知らせ。着脱簡単なカセット式バッテリーのため、交換・充電が楽に行えます。*鉛蓄電池比(当社従来製品)



※充電器は別売です

運用に合わせて選べる配置

■ キャスターロックペダル

スタンダードタイプ

フラットタイプ

コンパクトタイプ

標準装備(2つ)の他、オプションで追加の取付も可能です。取付位置は右図A~Dの4箇所から選択いただけます。



OPTION

■ イルリガートル架

スタンダードタイプ

フラットタイプ

右図取付位置①~④のうち、2箇所まで選択可能です。*

コンパクトタイプ

右図取付位置①~④のうち、2箇所まで選択可能です。*
加えて、本体昇降に追従する⑤⑥の選択も可能です。

* ①-②、③-④の組み合わせはお選びいただけません。




Options




スタンダードタイプ

サイドフェンスカバー
EB-BFT-SC

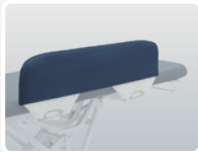

フラットタイプ

専用枕
EB-BFT-M

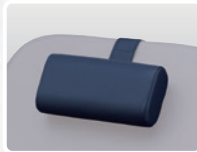

コンパクトタイプ

サブフットスイッチ*
EB-BFT-FS



予備バッテリーパック
DR-LIBP



※充電器は含みません

充電器
DR-LICHG




追加キャスター
ロックペダル




体圧分散マット*

体圧分散を考慮したプロ
ファイル加工のマットが
選択可能です。(受注生産)

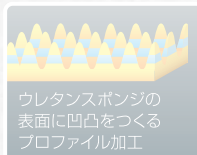


強 弱

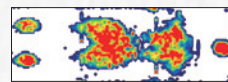

▲標準マット

体圧分散試験結果(当社試験)

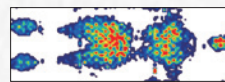

▲プロフィール加工マット

被験者:男性(165cm, 67kg)

スタンダードタイプ

小物トレイ
EB-BFT-KM



酸素ボンベホルダー*
(500L細型用)
EB-BFT-BHN



※酸素ボンベは含みません

イルリガートル架
(取付ブラケット1個付、
頭側・脚側共通)
EB-BFT-DN

追加ブラケット
EB-BFT-DN-BK



専用ロールシート／ロールシートホルダー
EB-OPT-R2 EB-BFT-PH



コンパクトタイプ

小物トレイ
EB-BFTC-KM



酸素ボンベホルダー*
(500L細型用)
EB-BFTC-BH



※酸素ボンベは含みません

イルリガートル架(取付ブラケット1個付)

頭側

EB-BFT-DN

追加ブラケット
EB-BFT-DN-BK



中央側

EB-BFTC-DC

追加ブラケット
EB-BFTC-DC-BK



脚側

EB-BFTC-DL

追加ブラケット
EB-BFTC-DL-BK



*本体に取り付けた状態で出荷する場合がございます。

Color Selection



ES23 [標準色]
アルドブルー



ES11
茶緑



ES15
ライトグリーン



ES16
パープルブルー

※3タイプとも上記カラーの選択が可能です。

抗菌・耐アルコール仕様の
合成皮革を採用



抗菌性

JIS Z 2801：2012「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」に基づいて、黄色ブドウ球菌・大腸菌の抗菌性試験を実施。



耐アルコール性

アルコールによる耐性試験を実施。
※当社基準に基づく

Specifications



製品コード	EB-BFTN(スタンダードタイプ) EB-BFTC(コンパクトタイプ) EB-BFTF(フラットタイプ)
本体寸法	650mm×1850mm(テーブルトップ寸法)
本体昇降範囲	500mm～930mm(電動ギアモータ式)
サイドフェンス	回転収納式
キャスター	直進ロック、4輪ロック、4輪フリー 切替え式
電気定格	DC21.6V 130VA

製品質量	80kg(スタンダードタイプ) 85kg(コンパクトタイプ) 75kg(フラットタイプ)
主な構成部品	ハンドスイッチ1個、バッテリーパック1個
一般的名称	汎用診断・処置用テーブル
特定保守	非該当
製造販売届出番号	27B1X00042000067
販売名	ベルフリット



Dimensions

単位 [mm]



EB-BFTN(スタンダードタイプ)

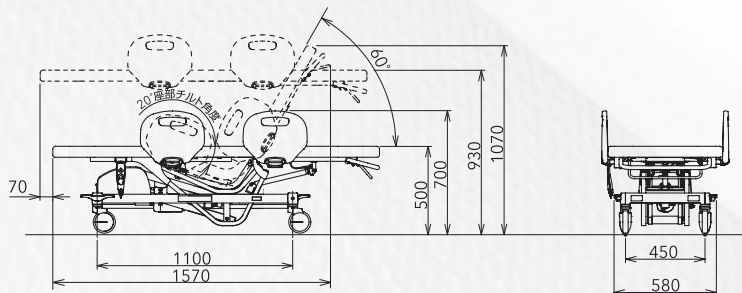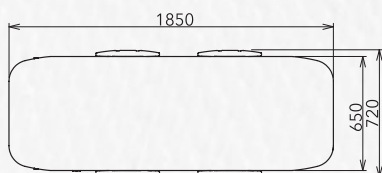

EB-BFTC(コンパクトタイプ)

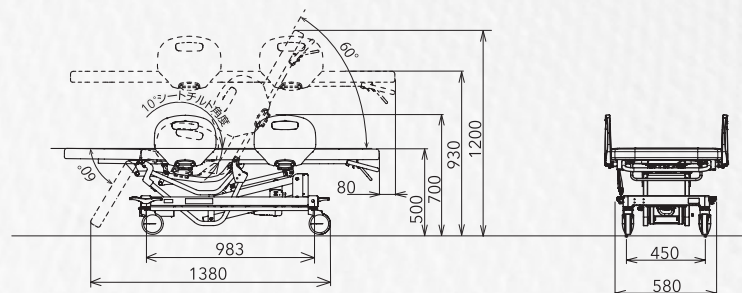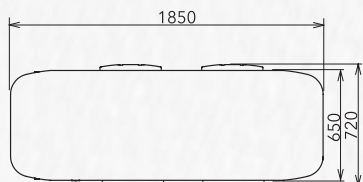

EB-BFTF(フラットタイプ)

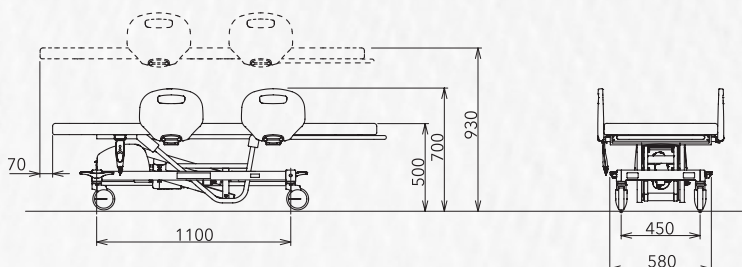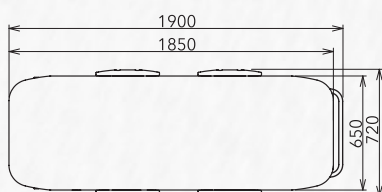

タカラベルモントの医療空間づくり

設計・施工、内装デザインについてお気軽にご相談ください。

医療空間の
設計・施工

精度の高い
医院づくり

医療機器の
開発・提供


タカラベルモントはグループの専門ノウハウを活かし、
表現力豊かな手法を駆使しつつ、医院の新装・改装をトータルにお手伝いしています。



タカラベルモント メディカル営業部公式

Instagram

施工事例やお役立ち情報を発信中 @takara_designworks_medical

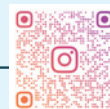

タカラベルモント株式会社

【大阪本社】 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3620

● メディカル営業部

札幌 (011)863-2139 仙台/盛岡 (022)231-3458 さいたま (048)640-5803 東京 (03)3401-9795
横浜/静岡 (045)523-7010 新潟 (025)333-8405 名古屋 (052)931-5163 金沢 (076)221-8412
大阪 (06)6211-5947 岡山 (086)233-8826 広島/高松 (082)277-6700 福岡 (092)474-7306
鹿児島 (099)226-9481

● ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19 (03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 (06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6 (098)897-6655



<https://me.takarabelmont.co.jp>

- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除される場合がございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2026年7月現在のものです。

お問合せは