

| 分娩台 |

DG-880



DELIVERY TABLE



“美しい”姿勢をつくる。

どうしても緊張してしまう医療の場で、リラックスしてほしい、
もちろん健康になってほしい、そしてなによりその尊厳が守られてほしい。
その全てを満たす“美しい”姿勢を実現することが、わたしたちタカラベルモント、メディカル営業部の使命です。

出産においても妊産婦、助産師、産婦人科医、みなさんにとってもっと“美しい”姿勢を実現したい。

そんな思いで Women's health care project、始めました。

誰よりも女性、産婦人科医の気持ちや負担を理解している助産師がチームに加わり新しい分娩台を開発。

さらに、出産だけでなく、その前後にある妊婦健診、産前産後ケア、婦人科検診においても

妊産婦の健康で尊厳のある美しさの実現を目指した取り組みをはじめています。



ウィメンズヘルスケア
事業の詳細はこちらから
<https://whc-takara.jp>

先輩ママの
リアルな声から
作成しました

妊娠から産後1年までの
わたしの体験記





分娩台 | DG-880

緊急時もしっかり対応 充実の機能を備えた 高機能分娩台

不安な陣痛中、緊急対応が求められる分娩中、赤ちゃんとともに安らぐ回復期を様々な機能でサポートします。

通常の分娩はもちろん緊急手術への移行もスムーズ



通常時

分娩第一期～第四期まで
様々な機能でサポート



緊急時

緊急時の対応を考慮した
充実機能を装備

*写真のサイドフェンスとサイド上肢台はオプションです。

分娩体位から手術位へ スムーズに移行

産婦さんに接近しやすい
テーブルトップ幅600mm。
サイドフェンスから
サイド上肢台へのチェンジも容易に



サイド上肢台を装着し位置を調節





ワンタッチでサイドフェンスを外す




スムーズに手術台へ移行

手術時のテーブルトップ 縦転・横転機構

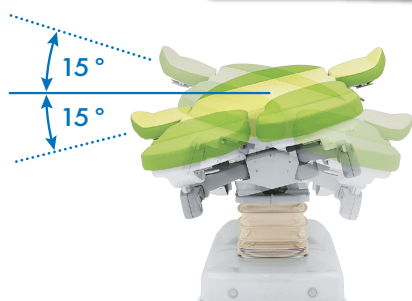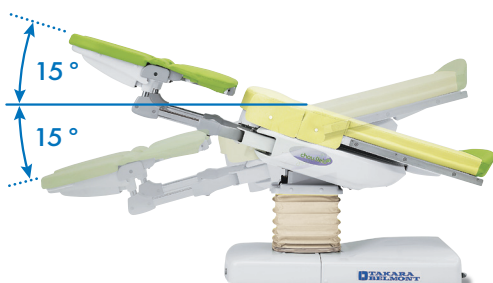

麻酔処置、血圧低下への対応など、
緊急時のポジション確保が可能です。

ストレッチャーの アプローチ

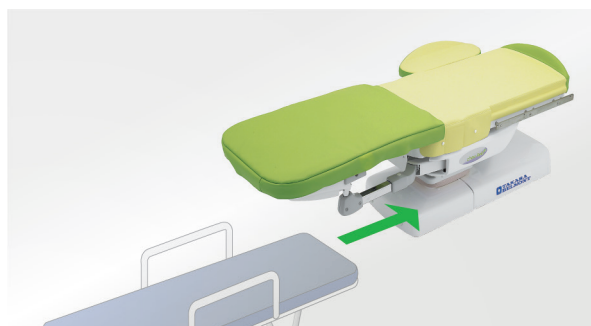

サイドフェンス／サイド上肢台を外すことにより、
ストレッチャーのスムーズな横付けが可能です。

いつものお産に必要な機能も充実

産婦さんの主体的なお産をサポートします。



簡単に取り出せて
持ちやすい怒責グリップ

側臥位やマックロバーツ位に



急速遂娩にも

すっきりとした
脚板形状で
脚元に2人入れる
スペースを確保



産婦さんをやさしくサポート

乗り降りしやすい
最低位590mm



無痛分娩時もハンモックのように
足をやさしくホールド



やさしい寝心地の
低反発マット



産婦さん自身で操作
できるハンドスイッチ



*オプションです。

やさしく包みこまれるようなフォルム
&カラーは「赤ちゃんはキャベツ畑で
生まれる」というヨーロッパの言い
伝えにちなみ、「キャベツ」をデザイン
コンセプトに開発しました。

シューフィールド
chou field

分娩位へ簡単セッティング



電動で開脚ができるフットスイッチのため手の清潔を保ち、少ない負担で分娩位へ移行が可能。産婦さんに合わせた調節もできます。

レバーを引き上げるだけの簡単操作。
ベッド状態から分娩位へ、医療スタッフの人数が少ない場合もスピーディーにセッティングできます。



フットスイッチ

左右の脚板は、フットスイッチを使ったセレクト開脚で片脚ずつ動かします。

介助・処置に配慮した新生児受け




新生児受けは処置・縫合の際に接近しやすい完全収納式。



スライドさせることで側面介助スペースをしっかり確保。
腰板と新生児受けの位置関係にも配慮しました。

骨盤誘導線を調整できる腰板単独昇降

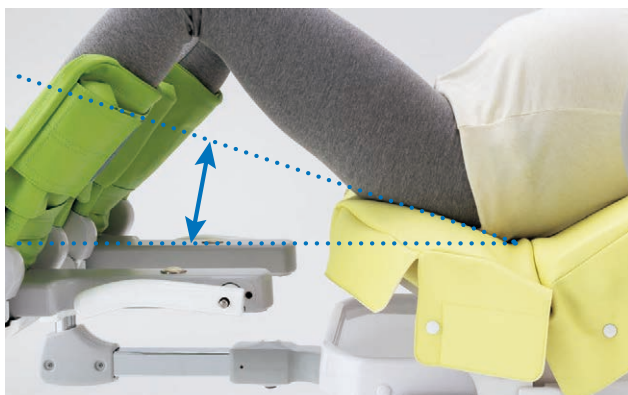

フットスイッチ操作にて腰板のみを上下昇降させることができ、分娩状況に合わせた腰板の調整が可能です。

清掃時などの移動を考慮



フリーキャスター＋本体ロックで移動・固定が容易に。
分娩前後のセッティング、清掃時などの移動がスムーズです。

I OPTIONS



○サイドフェンス
DG-880-SF



○サイド上肢台
DG-880-SA



○支脚器
DG-880-CN



○側臥位分娩用支脚器
DG-880-SCG



○補助支脚器
DG-880-CSQ



○頭上努責棒
DG-880-HG



○ハンズスイッチ
DG-880-HSW



○サイドレールS
DG-880-SR



○汚水トレイ
DG-880-XT

※ロートタイプもご用意しております。
汚水ロートDG-880-XRN



○収納カート
DG-880-OPC
サイドフェンス、
サイド上肢台等を収納

○分娩台ディスプレイカバー
(50枚/箱) (10枚/箱)
DG-OPT-DDC DG-OPT-DDCS

○分娩台脚板ディスプレイカバー125/150
(70組/箱) (10組/箱)
DG-OPT-FDC125 DG-OPT-FDC125S
DG-OPT-FDC150 DG-OPT-FDC150S

サイズは
125cm・150cmの2種類

I COLOR SELECTION



G1 グリーン(標準色)





P1 ピンク



B1 ブラウン

I SPECIFICATIONS

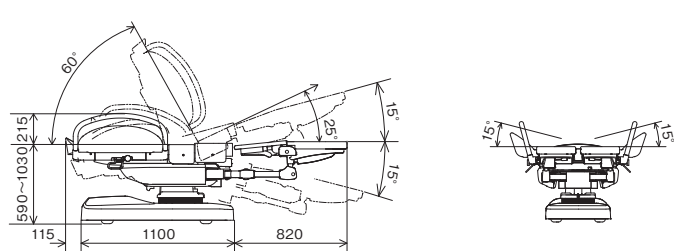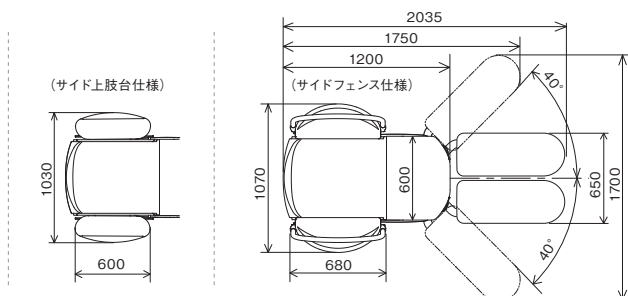

< 仕様 >

製品コード	DG-880V
電気定格	100V 50/60Hz 5A
質量	320kg(サイドフェンス仕様)、318kg(サイド上肢台仕様)
主な構成品	フットスイッチ1個/電源コード1本/枕1個/ シートカバー1枚/努責棒1組
一般的名称	分娩台
特定保守	非該当
製造販売届出番号	28B1X00012000061
販売名	分娩台 DG-880
製造販売業者	タカラメディカル株式会社 兵庫県尼崎市額田町5-15

タカラベルモントの医療空間づくり



設計・施工、内装デザインについてお気軽にご相談ください。

医療空間の
設計・施工

精度の高い
医院づくり

医療機器の
開発・提供

タカラベルモントはグループの専門ノウハウを活かし、
表現力豊かな手法を駆使しつつ、医院の新装・改装をトータルにお手伝いしています。

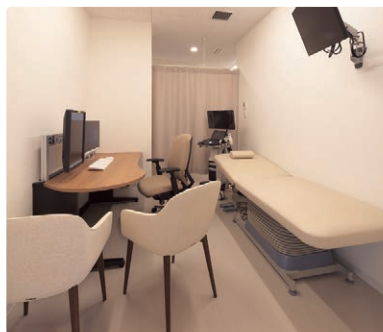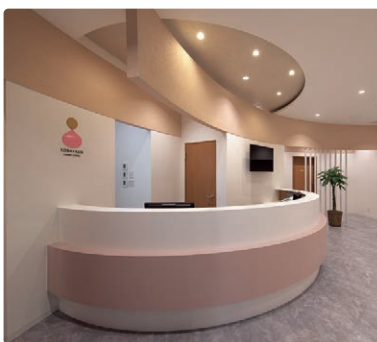

タカラベルモント
メディカル事業部公式

施工事例やお役立ち情報を発信中♪
@takara_designworks_medical



タカラベルモント株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3620

●メディカル営業部

札幌 (011)863-2139	金沢 (076)221-8412
仙台/盛岡 (022)231-3458	大阪 (06)6211-5947
さいたま (048)640-5803	岡山 (086)233-8826
東京 (03)3401-9795	広島/高松 (082)277-6700
横浜/静岡 (045)523-7010	福岡 (092)474-7306
新潟 (025)333-8405	鹿児島 (099)226-9481
名古屋 (052)931-5163	

●ショールーム

東京 東京都港区赤坂7-1-19	TEL.(03)3401-9795
大阪 大阪市中央区東心斎橋2-1-1	TEL.(06)6211-5947
沖縄 沖縄県宜野湾市大山3-4-6	TEL.(098)897-6655

<https://me.takarabelmont.co.jp>



- 製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
- 製品改良により、仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と異なることがあります。
- WEBサイトやリンク先のURLは、事前のご連絡なく変更、あるいは削除されることもございます。
- 納期については、事前に弊社営業にご確認ください。
- このカタログは2026年8月現在のものです。
- お問い合わせ



環境に配慮した植物性インキを使用しています